

# Hoe wordt de 24-uurs set gebruikt

Gebruiksaanwijzing: Q800



*Er zit een extra mondverzorgingsstaafje met afzuiging in elk tandenborstel bakje. Gebruik deze om afvalstoffen te verwijderen voor het tanden poetsen en voor extra reiniging wanneer dit nodig is.*



Trek aan het ophanglipje aan de bovenkant van de doos en hang de doos op. Open de doos zoals aangegeven en neem een bakje.



Trek met handschoenen aan het folie eraf. Zorg ervoor dat het schuim op de tandenborstel met afzuiging en / of het staafje met afzuiging en DenTips® intact is. Sluit het mondstaafje met afzuiging aan op de standaard afzuigslangen. Zorg ervoor dat de verbinding goed vast zit.



Gebruik een bijtblok bij mondzorg voor patiënten met veranderde bewustzijnsniveaus of mensen die geen opdrachten kunnen volgen. Doordrenk de tandenborstel / het staafje met water of gewenste vloeistof.



Poets zachtjes de tanden en het tandvlees gedurende ongeveer 1 tot 2 minuten. Zorg voor afzuiging door de duim poort te gebruiken.



Open de Medline mond bevochtiger en knijp het op de DenTips. Bedek de binnenkant van de mond er royaal mee (tanden, lippen, tong, gehemelte).



Zorg ervoor dat het schuim intact is voordat de tandenborstel met afzuiging en DenTips worden verwijderd. Inspecteer de mondholte en verwijder eventuele deeltjes, indien aanwezig.



Herhaal deze stappen elke 8 uur, tot alle bakjes gebruikt zijn.

**Voor meer informatie over de 24-uurs set** kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op: [nl.medline.eu](http://nl.medline.eu)