

Hinweise zur Verwendung des 24 Stunden Mundpflege-Sets



Gebrauchsanweisung: Q800



In jedem Zahnbürsten Einzel-Set befindet sich ein zusätzliches Absaug-Mundpflegestäbchen. Damit können vor dem Zähneputzen Sekrete entfernt und bei Bedarf eine zusätzliche Reinigung durchgeführt werden.



Reißen Sie die Lasche an der Oberseite der Box auf und hängen Sie die Box auf. Öffnen Sie den Karton an den beiden Markierungen, und nehmen Sie das untere Einzel-Set heraus.



Tragen Sie Handschuhe, und ziehen Sie die Folie von dem Einzel-Set ab. Vergewissern Sie sich, dass der Schaumstoff der Absaug-Zahnbürste, des Absaug-Mundpflegestäbchens und des Mundpflegestäbchens (DenTips®) intakt ist. Schließen Sie die Absaug-Zahnbürste bzw. das Absaug-Mundpflegestäbchen an das Absaugsystem an. Stellen Sie sicher, dass die Absaug-Zahnbürste bzw. das Absaug-Mundpflegestäbchen fest aufgesteckt ist.



Verwenden Sie einen Beißkeil, wenn Sie die Mundpflege bei Patienten durchführen, die nicht orientiert sind oder Anweisungen nicht verstehen können. Befeuchten Sie die Zahnbürste/das Mundpflegestäbchen mit Wasser oder der gewünschten Mundspülung.



Reinigen Sie die Zähne und das Zahnfleisch mit sanften Bewegungen etwa 1 bis 2 Minuten lang. Saugen Sie Sekrete mit Hilfe des Daumen-Ports ab.



Öffnen Sie das Medline Mundbefeuchtungsgel und geben Sie es auf das Mundpflegestäbchen (DenTips®). Befeuchten Sie damit ausreichend die Innenseite des Mundes, einschließlich Zähne, Lippen, Zunge und Gaumen.



Überprüfen Sie nach der Anwendung, ob der Schaumstoff intakt ist, bevor Sie die Absaug-Zahnbürste, das Absaug-Mundpflegestäbchen und das Mundpflegestäbchen (DenTips®) entsorgen. Untersuchen Sie die Mundhöhle und entfernen Sie eventuell vorhandene Partikel.



Wiederholen Sie den Vorgang alle 8 Stunden, bis alle Einzel-Sets aufgebraucht sind.

Für weitere Informationen, können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: de.medline.eu