

Comment utiliser le KIT ORAL CARE 24H

Mode d'emploi : Q800



1 bâtonnet aspirant en mousse disponible sur tous les plateaux. Utilisez-le pour enlever les sécrétions avant de brosser les dents et pour fournir un nettoyage supplémentaire en cas de besoin.



1

Tirez sur la sangle en plastique sur le dessus de la boîte pour l'accrocher. Ouvrez la boîte comme indiqué et prenez un plateau.




2

Avec les mains gantées, retirez le film plastique. Assurez-vous que la brosse à dent d'aspiration soit bien imprégnée de mousse et de l'intégrité du bâtonnet DenTips. Connectez la brosse à dents d'aspiration aux bouches d'aspiration standards. Assurez-vous que la connexion est sécurisée.



3

Utilisez un bloc de morsure lors des soins bucco-dentaires sur les patients dont le niveau de conscience est altéré ou pour ceux qui ne peuvent pas comprendre les instructions. Imprégnez la brosse à dents avec de l'eau ou votre solution habituelle.

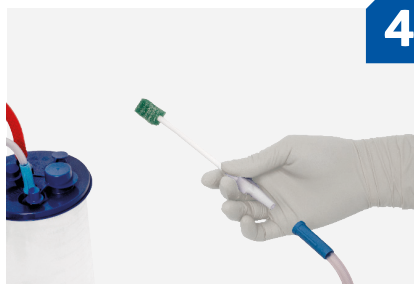

4

Nettoyez en douceur les dents et les gencives pendant environ 1 à 2 minutes. Vous pouvez contrôler l'aspiration en utilisant l'emplacement pour le pouce.



5

Ouvrez l'hydratant pour la bouche et appliquez-le sur le bâtonnet DenTips. Hydratez généreusement l'intérieur de la bouche (dents, lèvres, langue et palais).



6

Assurez-vous que la mousse soit intacte avant de jeter la brosse à dents d'aspiration et le bâtonnet DenTips. Inspectez la cavité buccale et enlevez les particules, si elles sont présentes.



7

Répétez la manipulation toutes les 8 heures jusqu'à ce que tous les plateaux soient utilisés.

Pour plus d'informations sur le kit 24H, veuillez contacter votre responsable commercial ou consultez notre site : fr.medline.eu