

Modalità di utilizzo del kit 24-ore

Istruzioni per l'uso: Q800



È presente un tampone di aspirazione extra in ogni singolo kit. Utilizzarlo per rimuovere le secrezioni prima di lavare i denti e per fornire una pulizia aggiuntiva quando necessario.



1 Rilasciare il gancio per sospensione tirando la linguetta sulla parte superiore della scatola e riaggancia la scatola. Aprire la scatola come indicato e prendere una confezione.



2 Indossando un paio di guanti, rimuovere la pellicola. Assicurarsi che la spugna sullo spazzolino e/o sul tampone con aspirazione e sul DenTips® siano intatte. Connettere il tampone al sistema di aspirazione. Assicurarsi che la connessione sia ben salda.



3 Utilizzare un blocco morso durante le procedure di igiene orale su pazienti con livelli alterati di coscienza o che non possono comprendere i comandi. Saturare il tampone di aspirazione con acqua o soluzione desiderata.



4 Pulire delicatamente denti e gengive per circa 1-2 minuti. Aspirare utilizzando il controllo del vuoto.



5 Aprire il gel idratante di Medline e spremere sul DenTips®. Distribuire delicatamente nella bocca (denti, labbra, lingua, palato).



6 Dopo l'uso, assicurarsi che la spugna sia intatta prima di smaltire il DenTips®. Ispezionare la cavità orale e rimuovere ogni residuo, se presente.



7 Ripetere la sequenza ogni 8 ore fino all'erogazione di tutti i set del kit.

Per ulteriori informazioni sui Kit 24-ore igiene orale,
contattare l'account manager o visitare il sito it.medline.eu