



# Spugnetta per lavaggio chirurgico.

Modalità d'uso. Spugnetta per il lavaggio chirurgico monouso con Clorexidina (4%).


REF 205 01

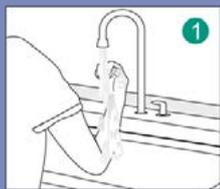

1 Bagnare mani, polsi e avambracci fino al gomito. Tenere le mani più in alto dei gomiti per tutto il lavaggio.

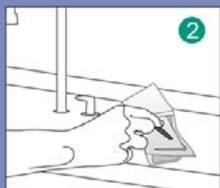

2 Utilizzare il pulisci unghie in dotazione

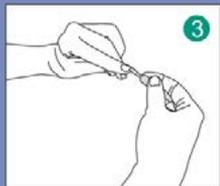

4 Utilizzare il lato con le setole per pulire le unghie, cuticole e gli spazi tra le dita e il lato spugna per mani e avambracci.

Bagnare e strizzare per attivare la schiuma



7\* Lavare unghie, cuticole e gli spazi tra le dita, mani e avambracci per 3 minuti in totale


\* Lavare per ulteriori 2 minuti se si usa solo il lato spugna



10 Risciacquare mani, polsi e avambracci con acqua abbondante



11 Asciugare con salviette sterili dalle mani fino ai gomiti. Tenere le mani sollevate

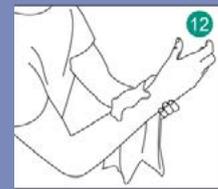

medbar®