

A long, blue fabric strip, likely a tourniquet, is shown in a coiled, three-dimensional perspective against a white background. It has a textured, woven appearance.

**VERHINDERN SIE
KREUZ-KONTAMINATIONEN.**

Tourniquets für den Einmalgebrauch
Einmal Venenstauer

TOURNIQUETS FÜR DEN EINMALGEBRAUCH

Medlines blaue Tourniquets sind für den Einmalgebrauch bestimmt und werden an Patienten für venöse Blutentnahme und das Anlegen intravenöser Kanülen verwendet. Wiederverwendbare Tourniquets stellen ein potentielles Kontaminierungsrisiko für Patienten und Ärzte dar, aufgrund mangelnder Desinfektion sowie fehlender Infektionskontrollen. Die Verwendung von Tourniquets begünstigt die Verbreitung von schweren Infektionen, wie zum Beispiel MRSA.

Neben oben genannter Gründe und Infektionsprävention, bieten unsere Tourniquets die folgenden Vorteile:

- Einmalprodukt,
- Kosteneffizienz, Qualität und Anwenderfreundlichkeit,
- Latexfreies, griffiges Material,
- Kein Verrutschen dank griffiger, latexfreier Oberflächenstruktur

Gebrauchsanweisung



1. Legen Sie das blaue Tourniquet um den Arm, überkreuzen und dehnen es
2. Drücken Sie das eine Ende straff um den Arm während Sie das andere Ende unter die Schlinge ziehen
3. Das Tourniquet bildet eine Schleife, bitte beachten Sie, dass beide Enden auf derselben Seite liegen - Verknoten Sie die Enden nicht!
4. Stauen Sie nun den gewünschten Bereich mit dem Tourniquet
5. Lösen Sie das Tourniquet, indem Sie an einem Ende ziehen (siehe Foto)
Anschließend entsorgen Sie das Tourniquet vorschriftsmäßig

| Artikelnummer | Beschreibung | Größe | VE |
|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
| DYNDE75020A | Einweg-Tourniquet | 2,5 x 45,7 cm | 100 Stück / Karton |
| DYNDE75025 | Einweg-Tourniquet | 2,5 x 55 cm | 25 Stück / Karton |



Für mehr Informationen, kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Außendienstmitarbeiter oder besuchen Sie uns unter www.medline.eu/de



ALWAYS
ON

Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2018 Medline Industries, Inc. Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.

MDD Klasse: I nicht steril gemäß 93/42/EWG
ML535-DE02/ML 04/2018.