

Lacci emostatici monouso



Indicazioni

I lacci emostatici monouso di Medline vengono utilizzati sui pazienti per prelievi di sangue venoso e incannulamento endovenoso.

Perché utilizzare i lacci emostatici monouso di Medline?

- I lacci Medline offrono **qualità, prezzo e facilità d'uso** eccezionali
- Realizzati in materiale confortevole e **latex free** che garantisce sicurezza e che può essere rimosso con una mano
- **Riduce il rischio di contaminazione crociata** promuovendo la politica del singolo utilizzo

Istruzioni per l'uso



1. Per prima cosa posizionate il laccio attorno al braccio, incrociate i due laccetti ed allungateli, tirandoli.
2. Continuate a tirare i laccetti e, tenendo premuta un'estremità, prendete l'altra e passatela sotto il punto di incrocio dei due laccetti, formando un'ansa.
3. Nel formare il 'fiocco', un'estremità deve risultare più lunga dell'altra. La parte più lunga deve passare sopra la più corta. Questo permette di poter piegare il laccio durante la formazione del 'fiocco'. Non fate un nodo, poiché scioglierlo potrebbe essere difficoltoso e causare problemi al paziente. Piegare un'estremità sotto l'altra per far rimanere in tutta sicurezza il laccio in posizione.
4. Rimuovete successivamente il laccio emostatico tirando l'estremità piegata sotto il 'fiocco'.
5. Smaltire il laccio emostatico nei rifiuti biologici dopo l'utilizzo.

Codice	Descrizione	Dimensioni	Confezionamento
DYNDE75020A	Lacci emostatici arrotolati, monouso	2.5 x 45.7 cm	100/conf.



Per ulteriori informazioni, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito www.medline.eu/it