



VAPrevent[®]
Mundpflege und
Infektions-
prävention

Anwendung: Absaug-Mundpflegestäbchen MDS096525EU

Die Absaugfunktion hilft bei der Beseitigung von Sekreten und der leicht abgeschrägte Kopf unterstützt Sie dabei, den hinteren Mundraum für eine gründliche Reinigung zu erreichen.

- 1** Ziehen Sie Handschuhe an und überprüfen Sie den Mund des Patienten. Saugen Sie bei Bedarf die gesamte Mundhöhle ab.
 - Verwenden Sie dazu beispielsweise eine Absaugkanüle.
- 2** Entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Zustand des Mundpflegestäbchens.
 - Schaumstoff, Griff, Konnektor ...
- 3** Verbinden Sie das Absaug-Mundpflegestäbchen mit dem Saugerschlauchsystem und verwenden Sie den Daumen-Port zur Saugkontrolle.
 - Verschließen Sie das Loch mit dem Daumen für die Absaugung.
 - Lassen Sie das Loch los, um die Absaugung zu stoppen.
- 4** Tränken Sie das Mundpflegestäbchen in einer geeigneten Lösung.
 - Wasser, Mundspülung usw.
- 5** Führen Sie eine Mundpflege für ein bis zwei Minuten durch.
 - Der Schaumstoff stimuliert das Mundgewebe.
 - Tauchen Sie das Mundpflegestäbchen bei Bedarf erneut in die Lösung ein.
- 6** Überprüfen Sie nach Abschluss die Mundhöhle des Patienten und entfernen Sie eventuelle Ablagerungen, bevor Sie das Mundpflegestäbchen entsorgen.



Um mehr über Mundpflege zu erfahren, können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



VAPrevent[®]
Mundpflege und
Infektions-
prävention

Anwendung: Absaug-Zahnbürste MDS096575EU

Die besonders weiche Zahnbürste mit Schwamm, wird für die mechanische Reinigung und Stimulation der Zähne und des Zahnfleisches verwendet. Die Absaugfunktion hilft, Sekrete zu beseitigen.

- 1** Ziehen Sie Handschuhe an und überprüfen Sie den Mund des Patienten. Saugen Sie bei Bedarf die gesamte Mundhöhle ab.
 - Verwenden Sie dazu beispielsweise eine Absaugkanüle.
- 2** Entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Zustand der Zahnbürste.
 - Schaumstoff, Griff, Konnektor ...
- 3** Verbinden Sie die Absaug-Zahnbürste mit dem Absaugsystem und verwenden Sie den Daumen-Port zur Saugkontrolle.
 - Verschließen Sie das Loch mit dem Daumen für die Absaugung.
 - Lassen Sie das Loch los, um die Absaugung zu stoppen.
- 4** Tränken Sie die Zahnbürste in einer geeigneten Lösung.
 - Wasser, Mundspülung usw.
- 5** Führen Sie eine Mundpflege für ein bis zwei Minuten durch.
 - Verwenden Sie die Borsten zum Bürsten.
 - Der Schaumstoff stimuliert das Mundgewebe.
 - Tauchen Sie die Zahnbürste bei Bedarf erneut in die Lösung ein.
- 6** Überprüfen Sie nach Abschluss die Mundhöhle des Patienten und entfernen Sie eventuelle Ablagerungen, bevor Sie die Zahnbürste entsorgen.



Um mehr über Mundpflege zu erfahren, können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.