



VAPrevent®
Soins bucco-
dentaires et
prévention
des infections

Mode d'emploi : Bâtonnet aspirant MDS096525EU

La fonction d'aspiration facilite l'élimination des sécrétions et la tête inclinée permet d'atteindre l'arrière de la bouche pour un nettoyage complet.

- 1** Avec vos mains gantées, vérifier la bouche du patient et démarrez le système d'aspiration de la cavité buccale, si nécessaire.
 - Avec une canule d'aspiration, par exemple
- 2** Retirer l'emballage et vérifier l'état de l'écouvillon.
 - Mousse, poignée, connecteur ...
- 3** Connecter l'écouvillon aspirant au système d'aspiration et utiliser l'orifice du pouce pour contrôler l'aspiration.
 - Boucher le trou avec le pouce pour l'aspiration.
 - Relâcher l'orifice pour arrêter l'aspiration.
- 4** Saturer l'écouvillon avec une solution appropriée.
 - Eau, bain de bouche etc..
- 5** Effectuer les soins bucco-dentaires pendant 1 à 2 minutes.
 - La mousse stimule les tissus buccaux.
 - Si nécessaire, replonger l'écouvillon dans la solution.
- 6** Une fois terminé, vérifier la cavité buccale du patient et retirer les possibles débris avant de jeter l'écouvillon.



Pour en savoir plus sur les soins bucco-dentaires, contacter votre responsable commercial ou consulter le site : www.medline.eu/fr



VAPrevent®
Soins bucco-
dentaires et
prévention
des infections

Mode d'emploi : Brosse à dents aspirante (MDS096575EU)

Le côté de la brosse avec les poils doux permet un brossage et un débridement mécanique des dents pendant que le côté mousse stimule les muqueuses. La fonction aspirante permet d'éliminer les sécrétions.

- 1 Avec vos mains gantées, vérifier la bouche du patient et démarrez le système d'aspiration de la cavité buccale, si nécessaire.
 - Avec une canule d'aspiration, par exemple
- 2 Retirer l'emballage et vérifier l'état de la brosse à dent.
 - Mousse, poignée, connecteur ...
- 3 Connecter l'écouvillon aspirant au système d'aspiration et utiliser l'orifice du pouce pour contrôler l'aspiration.
 - Boucher le trou avec le pouce pour l'aspiration.
 - Relâcher l'orifice pour arrêter l'aspiration.
- 4 Saturer la brosse à dents avec une solution appropriée.
 - Eau, bain de bouche etc..
- 5 Effectuer les soins bucco-dentaires pendant 1 à 2 minutes.
 - Utilisez les poils pour le brossage.
 - La mousse stimule les tissus buccaux.
 - Si nécessaire, replonger l'écouvillon dans la solution.
- 6 Une fois terminé, vérifier la cavité buccale du patient et retirer les possibles débris avant de jeter l'écouvillon.



Pour en savoir plus sur les soins bucco-dentaires,
contacter votre responsable commercial ou consulter
le site : www.medline.eu/fr