



VAPrevent[®]
Higiene oral e
prevenção de
infecções

Como usar: Zaragatoa com Sucção MDS096525EU

A função de sucção ajuda a remover as secreções e a cabeça em ângulo ajuda a alcançar a parte posterior da boca para uma limpeza mais profunda.

- 1** Com luvas calçadas, examine a boca do paciente e aplique sucção global na cavidade oral, se necessário.
 - Com uma cânula de sucção, por exemplo
- 2** Remova a embalagem e verifique o estado da zaragatoa.
 - Espuma, punho, conector ...
- 3** Ligue a zaragatoa de sucção ao sistema de tubo de sucção e use a porta do polegar para controlar a sucção.
 - Tape o orifício com o polegar para obter sucção.
 - Solte o orifício para parar a sucção.
- 4** Saturar a zaragatoa com uma solução adequada.
 - Água, colutório, etc.
- 5** Realize a higiene oral durante 1 a 2 minutos.
 - A espuma estimula o tecido oral.
 - Mergulhe a zaragatoa na solução novamente, se necessário.
- 6** Quando terminar, examine a cavidade oral do paciente e remova quaisquer possíveis detritos antes de eliminar a zaragatoa.



Para saber mais sobre higiene oral, contacte o seu gestor de conta ou consulte: www.medline.eu/pt



VAPrevent®
Higiene oral e
prevenção de
infecções

Como usar: Escova de dentes com sucção MDS096575EU

A escova de dentes super macia com esponja é usada no desbridamento mecânico e estimulação dos dentes e das gengivas. A função de sucção ajuda a remover secreções.

- 1** Com luvas calçadas, examine a boca do paciente e aplique sucção global na cavidade oral, se necessário.
 - Com uma cânula de sucção, por exemplo
- 2** Remova a embalagem e verifique o estado da escova de dentes.
 - Espuma, punho, conector ...
- 3** Ligue a escova de dentes com sucção ao sistema de tubo de sucção e use a porta do polegar para controlar a sucção.
 - Tape o orifício com o polegar para obter sucção.
 - Solte o orifício para parar a sucção.
- 4** Saturar a escova de dentes com uma solução adequada.
 - Água, colutório, etc.
- 5** Realize a higiene oral durante 1 a 2 minutos.
 - Use as cerdas para escovar.
 - A espuma estimula o tecido oral.
 - Mergulhe novamente a escova de dentes na solução, se necessário.
- 6** Quando terminar, examine a cavidade oral do paciente e remova quaisquer possíveis detritos antes de eliminar a escova de dentes.



Para saber mais sobre higiene oral, contacte o seu gestor de conta ou consulte: www.medline.eu/pt