

VAPrevent[®] Mundpflege-Set

Gebrauchsanweisung: MDS096013MEU



1 Ziehen Sie Handschuhe an und überprüfen Sie die Mundhöhle des Patienten. Verwenden Sie ein Absaugsystem, wenn nötig. Ziehen Sie anschließend die Verpackungsfolie ab, nehmen das Mundpflegestäbchen (DenTips[®]) heraus und überprüfen Sie vorsichtig, ob der Schaumstoff auf dem Mundpflegestäbchen intakt ist.



2 Verwenden Sie einen Beißkeil, wenn Sie Mundpflege bei Patienten mit veränderten Bewusstseinsstufen oder Patienten, die Anweisungen nicht verstehen können, durchführen. Öffnen Sie die Medline Mundspülung und gießen Sie diese in den integrierten Becher der Verpackung.



3 Befeuchten Sie den Schaumstoff des Mundpflegestäbchens (DenTips[®]) gut mit Mundspülung. Reinigen Sie ca. 1 bis 2 Minuten behutsam die Zähne und das Zahnfleisch.



4 Überprüfen Sie nach der Verwendung, ob der Schaumstoff intakt ist, bevor Sie das Mundpflegestäbchen (DenTips[®]) entsorgen. Untersuchen Sie die Mundhöhle und entfernen Sie eventuell vorhandene Partikel.



5 Öffnen Sie das Medline Mundbefeuchtungsgel und geben Sie es auf das Mundpflegestäbchen (DenTips[®]). Befeuchten Sie sorgsam die Innenseite des Mundes, einschließlich Zähne, Lippen, Zunge und Gaumen.



6 Überprüfen Sie nach der Anwendung, ob der Schaumstoff intakt ist, bevor Sie das Mundpflegestäbchen (DenTips[®]) entsorgen. Untersuchen Sie die Mundhöhle und entfernen Sie eventuell vorhandene Partikel.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de