

VAPrevent®

Instrucciones de uso: MDS096013MEU



Utilizando guantes de examen, inspeccione la cavidad bucal del paciente para verificar la condición de ésta. A continuación, abra el envase, extraiga DenTips® y compruebe con suavidad que la espuma de DenTips está intacta.



Utilice una pieza que evite la mordida cuando realice el lavado bucal en pacientes inconscientes o incapaces de realizar órdenes. Abra el colutorio bucal de Medline y viértalo en la copa del envase.



Impregne la espuma de DenTips con el colutorio bucal. Limpie con suavidad los dientes y las encías durante aproximadamente 1 o 2 minutos.



Después del uso, compruebe que la espuma está intacta antes de deshacerse de DenTips. Inspeccione la cavidad bucal y retire cualquier partícula que haya presente.



Abra el hidratante bucal de Medline y aplíquelo sobre DenTips. Cubra con suavidad el interior de la boca (dientes, labios, lengua, paladar) con él.



Después del uso, compruebe que la espuma está intacta antes de deshacerse de DenTips. Inspeccione la cavidad bucal y retire cualquier partícula que haya presente.

Para obtener más información sobre cuidado bucal, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite: es.medline.eu