

VAPrevent®

Gebruiksaanwijzing: MDS096013MEU



Trek handschoenen aan, controleer de mond van de patiënt en zuig de mondholte zo nodig uit. Trek vervolgens de verpakking folie terug, verwijder DenTips® en zorg er voorzichtig voor dat de DenTips Foam intact is.



Gebruik een bijtblok bij mondzorg voor patiënten met veranderde bewustzijnsniveaus of mensen die opdrachten niet kunnen bevatten. Open de Medline mondspoeling en giet deze in de beker van de verpakking.



Bevochtig de DenTips schuim met mondspoeling. Poets zachtjes tanden en tandvlees gedurende ongeveer 1 tot 2 minuten.



Na gebruik, zorg ervoor dat het schuim intact is voor het verwijderen van DenTips. Inspecteer de mondholte en verwijder eventuele deeltjes, indien aanwezig.



Open de Medline mond bevochtiger en knijp het op DenTips. Bedek de binnenkant van de mond er voorzichtig mee (tanden, lippen, tong, gehemelte).



Na gebruik, zorg ervoor dat het schuim intact is voor het verwijderen van DenTips. Inspecteer de mondholte en verwijder eventuele deeltjes, indien aanwezig.

Voor meer informatie over mondverzorging kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op: www.medline.eu/nl