

VAPrevent®

Instruções de utilização: MDS096013MEU



Com luvas calçadas, examine a cavidade oral do paciente e aspire se necessário. Depois, puxe para trás a película da embalagem, retire a DenTips® e, delicadamente, certifique-se de que a espuma da DenTips está intacta.



Ao realizar a higiene oral em pacientes com níveis de consciência alterados ou em pacientes que não conseguem compreender ordens, utilize um afastador bucal. Abra o elixir Medline e deite-o no recipiente.



Sature a espuma DenTips com o elixir. Limpar delicadamente os dentes e as gengivas durante aproximadamente 1-2 minutos.



Após a utilização, certifique-se de que a espuma está intacta antes de eliminar a DenTips®. Inspeccione a cavidade oral e remova quaisquer partículas, se as houver.



Abrir o hidratante oral Medline e deitar na esponja. Aplicar delicadamente no interior da boca (dentes, lábios, língua, palato).



Após a utilização, certifique-se de que a espuma está intacta antes de eliminar a DenTips®. Inspeccione a cavidade oral e remova quaisquer partículas, se existirem.

Para ficar a saber mais sobre higiene oral, entre em contacto com o gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt