



1 Ziehen Sie Handschuhe an und überprüfen Sie die Mundhöhle des Patienten. Verwenden Sie ein Absaugsystem, wenn nötig. Ziehen Sie anschließend die Verpackungsfolie ab, nehmen das Mundpflegestäbchen (DenTips®) heraus und überprüfen Sie vorsichtig, ob der Schaumstoff auf dem Mundpflegestäbchen intakt ist.



2 Verwenden Sie einen Beißkeil, wenn Sie die Mundpflege bei Patienten durchführen, die nicht orientiert sind oder Anweisungen nicht verstehen können. Öffnen Sie die Medline Mundspülung und gießen Sie diese in den integrierten Becher der Verpackung.



3 Tränken Sie den ersten DenTip® mit Mundwasser. Reinigen Sie die Zähne und das Zahnfleisch mit sanften Bewegungen etwa 1 bis 2 Minuten lang.



4 Überprüfen Sie nach der Anwendung, ob der Schaumstoff intakt ist, bevor Sie das Mundpflegestäbchen (DenTips®) entsorgen. Untersuchen Sie die Mundhöhle und entfernen Sie eventuell vorhandene Partikel.



5 Öffnen Sie die Medline Mundspülung und bedecken Sie damit den zweiten DenTip®. Verwenden Sie es, um das Innere des Mundes (innere Lippen, Zähne, Zunge und Gaumen) sanft zu bestreichen.



6 Überprüfen Sie nach der Anwendung, ob der Schaumstoff intakt ist, bevor Sie das Mundpflegestäbchen (DenTips®) entsorgen. Untersuchen Sie die Mundhöhle und entfernen Sie eventuell vorhandene Partikel.