

VAPrevent®

Instrucciones de uso: MDS096013MEU



Utilizando guantes de examen, inspeccione la cavidad bucal del paciente para verificar la condición de ésta. A continuación, abra el envase, extraiga DenTips® y compruebe con suavidad que la espuma de DenTips está intacta.



Use una pieza de mordida cuando realice el cuidado bucal en pacientes con niveles alterados de conciencia o incapaces de comprender órdenes. Abra el colutorio bucal de Medline y viértalo en la copa del envase.



Impregne la espuma de DenTips con el colutorio bucal. Limpie con suavidad los dientes y las encías durante aproximadamente 1 o 2 minutos.



Después del uso, compruebe que la espuma está intacta antes de deshacerse de DenTips. Inspeccione la cavidad bucal y retire cualquier partícula que pueda quedar.



Abra el hidratante bucal de Medline y aplíquelo sobre DenTips. Utilícelo para recubrir suavemente el interior de la boca (labios internos, dientes, lengua y paladar).



Después del uso, compruebe que la espuma está intacta antes de deshacerse de DenTips. Inspeccione la cavidad bucal y retire cualquier partícula que pueda quedar.

Si desea más información sobre el cuidado bucodental, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es