

# VAPrevent®

Gebruiksaanwijzing: MDS096013MEU



1  
Trek handschoenen aan, controleer de mond van de patiënt en zuig de mondholte indien nodig uit. Trek vervolgens de verpakking folie open, verwijder de DenTips® en zorg ervoor dat de DenTips Foam intact is.



2  
Gebruik een bijtblok bij mondzorg voor patiënten met veranderde bewustzijnsniveaus of mensen die geen opdrachten kunnen volgen. Open de Medline mondspoeling en giet deze in de beker van de verpakking.



3  
Bevochtig de DenTips foam met mondspoeling. Poets zachtjes de tanden en het tandvlees gedurende ongeveer 1 tot 2 minuten.



4  
Na gebruik, zorg ervoor dat het schuim intact is voor het verwijderen van DenTips. Inspecteer de mondholte en verwijder eventuele deeltjes, indien aanwezig.



5  
Open de Medline mondbevochtiger en knijp het leeg op de tweede DenTips. Gebruik het om de binnenkant van de mond (binnenkant van lippen, tanden, tong en gehemelte) zachtjes in te smeren.



6  
Na gebruik, zorg ervoor dat het schuim intact is voor het verwijderen van DenTips. Inspecteer de mondholte en verwijder eventuele deeltjes, indien aanwezig.

**Neem voor meer informatie over mondverzorging contact op met uw Medline accountmanager of ga naar: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)**