



VAPREVENT™

ISTRUZIONI D'USO - MDS096013MEU




1



Indossare guanti, controllare il cavo orale del paziente. Rimuovere la pellicola e assicurarsi che il prodotto sia integro.

3

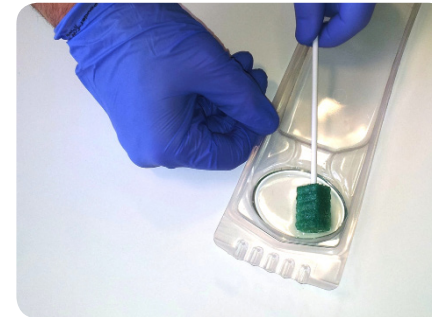

Immergere la spugnetta Dentips® nella soluzione Medline Mouth Rinse e procedere con la pulizia del cavo orale rimuovendo i residui.

2



Aprire la soluzione Medline Mouth Rinse e versarla nella vaschetta presente nella confezione.

4



Dopo la pulizia, aprire il gel idratante Medline e passare delicatamente il prodotto nella cavità orale (lingua, palato, gengive, mucosa interna) ed all'esterno (labbra ed angoli della bocca).

Al termine dell'utilizzo, controllare se all'interno della cavità siano rimasti residui e rimuoverli se presenti.

Per saperne di più su i prodotti Oral Care, contatta il nostro rappresentante di vendita o visita il nostro sito www.medline.com/it