



VAPREVENT™

ISTRUZIONI D'USO - MDS096513MEU



1



Indossare guanti, controllare il cavo orale del paziente e collegare il canale di aspirazione ai circuiti standard se necessario.


Rimuovere la pellicola e assicurarsi che il prodotto sia integro.

2




Aprire Medline Mouth Rinse e versarlo nella vaschetta presente nella confezione.

3

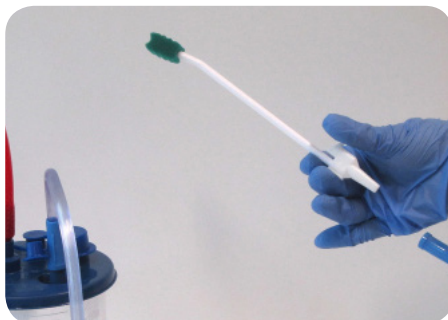

Collegare il canale di aspirazione ai tubi standard di aspirazione; utilizzare il pollice per regolare il flusso di aspirazione.

4

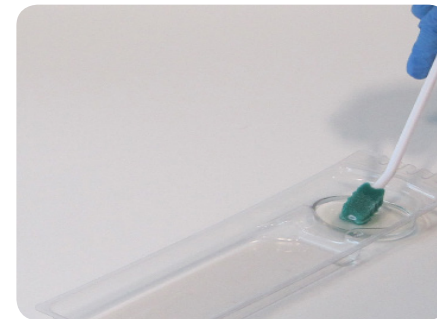

Immergere le spugnette nella soluzione Medline Mouthwash. Stimolare la mucosa e rimuovere sia le secrezioni che i residui attraverso l'aspirazione. Utilizzare il pollice per regolare il flusso di aspirazione.

5



Dopo la pulizia, aprire il gel idratante Medline e mettere il gel su Dentips. Passare delicatamente il prodotto nella cavità orale (lingua, palato, gengive, mucosa interna) ed all'esterno (labbra ed angoli della bocca).

6



Al termine dell'utilizzo, controllare se all'interno della cavità siano rimasti residui e rimuoverli se presenti.

Per saperne di più su i prodotti Oral Care, contatta il nostro rappresentante di vendita o visita il nostro sito www.medline.com/it