

VAPrevent®

Istruzioni per l'uso: MDS096513MEU



1 Indossare i guanti, controllare la bocca del paziente ed effettuare una prima aspirazione nella cavità orale, se necessario. Poi aprire la confezione tirando la pellicola posteriore e assicurarsi che la spugna del DenTips® sia integra.



2 Utilizzare un blocca morso durante le procedure di igiene orale su pazienti con livelli alterati di coscienza o che non possono comprendere i comandi. Aprire il collutorio di Medline e versarlo nella coppa presente nel confezionamento.



3 Connettere il tampone di aspirazione al sistema di aspirazione. Controllare che la connessione sia ben salda.



4 Pulire delicatamente denti e gengive per circa 1-2 minuti. Aspirare utilizzando il controllo del vuoto.



5 Aprire il gel idratante di Medline e spremere sul DenTips® Distribuire delicatamente nella bocca (denti, labbra, lingua, palato).



6 Dopo l'uso, assicurarsi che la spugna sia intatta prima di smaltire il DenTips®. Ispezionare la cavità orale e rimuovere ogni residuo, se presente.

Per ulteriori informazioni sulla cura del cavo orale, contattare l'account manager o visitare il sito: www.medline.eu/it