



1
Com luvas calçadas, examine a cavidade oral do paciente e aspire se necessário. Depois, puxe para trás a película da embalagem e certifique-se de que a espuma da zaragatoa com sucção e da escova DenTips® se encontra intacta.



2
Ao realizar a higiene oral em pacientes com níveis de consciência alterados ou em pacientes que não conseguem compreender ordens, utilize um afastador bucal. Abra o elixir Medline e deite-o no recipiente.



3
Conectar a zaragatoa com sucção a um tubo de sucção normal. Verifique se a ligação é segura.



4
Limpar delicadamente os dentes e as gengivas durante aproximadamente 1-2 minutos. Aspirar, tapando a entrada do orifício da zaragatoa, junto do polegar.



5
Abrir o hidratante oral Medline e deitar na esponja. Aplicar livremente no interior da boca (dentes, lábios, língua, palato).



6
Certifique-se de que a espuma está intacta, antes de eliminar a DenTips® e as zaragatoas com sucção. Inspeccionar a cavidade oral e remover quaisquer partículas, se existirem.

Para ficar a saber mais sobre higiene oral, entre em contacto com o gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt