


# VAPrevent®

Anwendungshinweise: MDS096513MEU

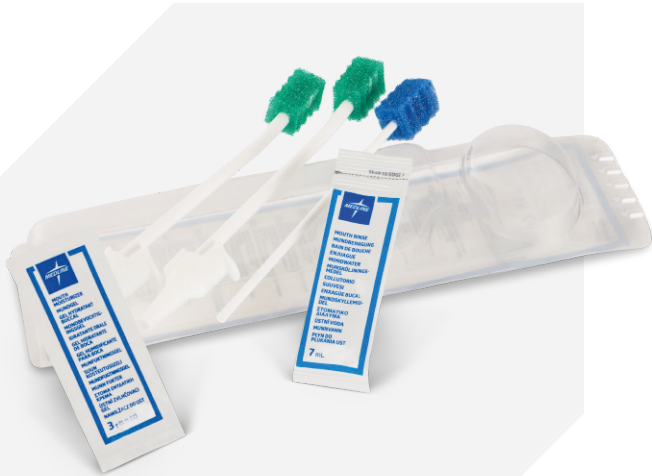

1 Ziehen Sie Handschuhe an und überprüfen Sie die Mundhöhle des Patienten. Verwenden Sie ein Absauggerät, wenn nötig. Ziehen Sie anschließend die Verpackungsfolie ab und überprüfen vorsichtig, ob der Schaumstoff auf den Absaug-Mundpflegestäbchen und dem Mundpflegestäbchen (DenTips®) intakt ist.



2 Verwenden Sie einen Beißkeil, wenn Sie die Mundpflege bei Patienten durchführen, die nicht orientiert sind oder Anweisungen nicht verstehen können. Öffnen Sie die Medline Mundspülung und gießen Sie diese in den integrierten Becher der Verpackung.



3 Schließen Sie das Absaug-Mundpflegestäbchen an das Absaugsystem an. Stellen Sie sicher, dass das Absaug-Mundpflegestäbchen fest aufgesteckt ist.



4 Reinigen Sie ca. 1 bis 2 Minuten behutsam die Zähne und das Zahnfleisch. Saugen Sie Sekrete mit Hilfe des Daumen-Ports ab.



5 Öffnen Sie das Medline Mundbefeuchtungsgel und geben Sie es auf das Mundpflegestäbchen (DenTips®). Verwenden Sie es, um das Innere des Mundes (innere Lippen, Zähne, Zunge und Gaumen) großzügig zu bestreichen.



6 Überprüfen Sie nach der Verwendung, ob der Schaumstoff intakt ist, bevor Sie die Absaug-Mundpflegestäbchen entsorgen. Untersuchen Sie die Mundhöhle und entfernen Sie eventuell vorhandene Partikel.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).