


VAPrevent®

Mode d'emploi : MDS096513MEU

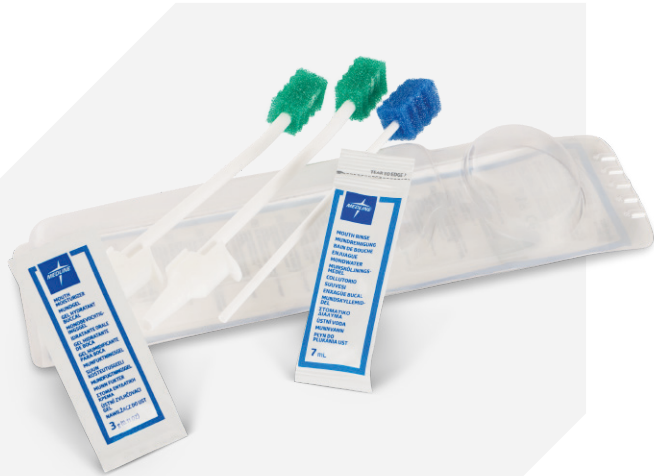

Avec vos mains gantées, vérifiez la bouche du patient et démarrez le système d'aspiration de la cavité buccale, si nécessaire. Puis, retirez le film d'emballage et vérifiez que la mousse de la brosse à dents à aspiration et du bâtonnet DenTips® est intacte.



Utilisez une pièce à mordre lors des soins bucco-dentaires chez les patients dont l'état de conscience est altéré. Ouvrez le rince-bouche Medline et versez-le dans l'espace prévu à cet effet dans le blister.



Connectez le bâtonnet à aspiration à la ligne d'aspiration standard. Vérifiez qu'elles sont solidement connectées.



Nettoyez doucement les dents et les gencives pendant environ 1 à 2 minutes. Aspirez à l'aide de la commande au pouce.



Ouvrez la crème hydratante buccale Medline et pressez-la pour en déposer sur le bâtonnet DenTips. Utilisez pour enduire généreusement l'intérieur de la bouche (lèvres intérieures, dents, langue et palais).



Vérifiez que la mousse est intacte avant de mettre les bâtonnets à aspiration et DenTips au rebut. Inspectez la cavité buccale et retirez-en les particules éventuellement présentes.

Pour en savoir plus sur les soins bucco-dentaires, contactez votre responsable commercial Medline ou consultez le site www.medline.eu/fr