

VAPrevent®

Istruzioni per l'uso: MDS096513MEU



1
Indossare i guanti, controllare la bocca del paziente ed effettuare una prima aspirazione nella cavità orale, se necessario. Poi aprire la confezione tirando la pellicola posteriore e assicurarsi che la spugna del DenTips® sia integra.



2
Utilizzare un blocco morso durante le procedure di igiene orale su pazienti con livelli alterati di coscienza o che non possono comprendere i comandi. Aprire il colluttorio di Medline e versarlo nell'apposita vaschetta presente nel confezionamento.



3
Connettere il tampone di aspirazione al sistema di aspirazione. Controllare che la connessione sia ben salda.



4
Pulire delicatamente denti e gengive per circa 1-2 minuti. Aspirare utilizzando il controllo del vuoto.



5
Aprire il gel idratante di Medline e spremere sul DenTips® Utilizzarlo per rivestire abbondantemente l'interno della bocca (labbra interne, denti, lingua e palato).



6
Dopo l'uso, assicurarsi che la spugna sia intatta prima di smaltire il DenTips®. Ispezionare la cavità orale e rimuovere ogni residuo, se presente.

Per saperne di più sull'igiene orale,
contattare l'account manager
Medline di zona o visitare il sito:
www.medline.eu/it