


# VAPrevent®

Gebruiksaanwijzing: MDS096513MEU

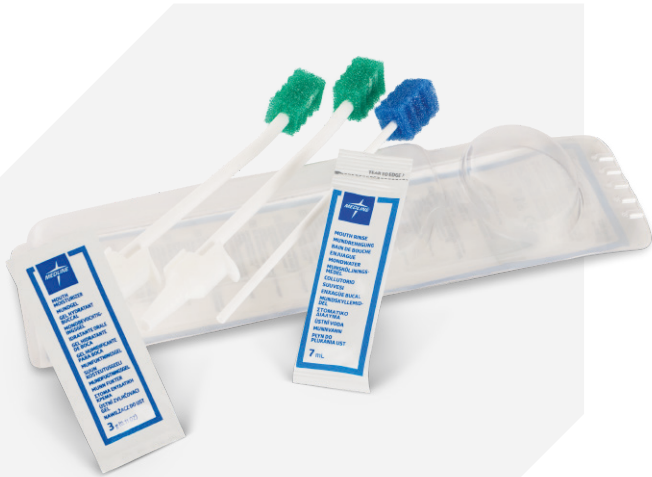

Trek handschoenen aan, controleer de mond van de patiënt en zuig de mondholte indien nodig uit. Trek vervolgens de verpakkingsof open en zorg ervoor dat het schuim op zuig doekjes en DenTips® intact is.



Gebruik een bijtblok bij mondzorg voor patiënten met veranderde bewustzijnsniveaus of mensen die geen opdrachten kunnen volgen. Open de Medline mondspoeling en giet deze in de beker van de verpakking.



Sluit het zuigstaafje aan op de standaard zuigleiding. Controleer op veilige verbinding.



Poets zachtjes tanden en tandvlees gedurende ongeveer 1 tot 2 minuten. Zorg voor afzuiging door de duimpoort te gebruiken.



Open de Medline mond bevochtiger en knijp het op de DenTips. Gebruik het om de binnenkant van de mond (binnenkant van lippen, tanden, tong en gehemelte) rijkelijk te bedekken.



Zorg ervoor dat het schuim intact is voordat u de mondverzorgingsstaafjes met afzuiging en DenTips verwijdert. Inspecteer de mondholte en verwijder eventuele deeltjes, indien aanwezig.

**Neem voor meer informatie over mondverzorging contact op met uw Medline accountmanager of ga naar: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)**