


VAPrevent®

Instruções de utilização: MDS096513MEU

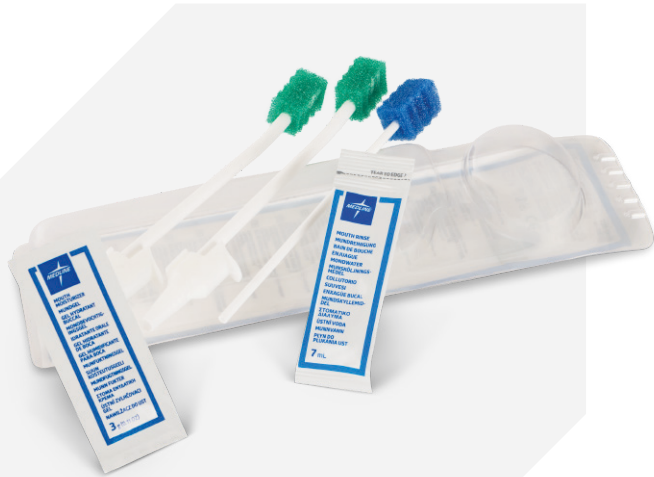

Com as luvas calçadas, examine a boca do doente e forneça sucção global na cavidade oral se necessário. Depois, puxe para trás a película da embalagem e certifique-se de que a espuma da zaragatoa com sucção e da escova DenTips® se encontra intacta.



Ao realizar a higiene oral em doentes com níveis de consciência alterados ou em pacientes que não conseguem compreender ordens, utilize um afastador bucal. Abra o elixir Medline e deite-o no copo que vem na embalagem.



Ligar a zaragatoa com sucção a um tubo de sucção normal. Verifique se a ligação é segura.



Limpar delicadamente os dentes e as gengivas durante aproximadamente 1-2 minutos. Fornecer sucção através da porta operada por polegar.



Abriu o hidratante oral Medline e deitar na DenTips. Utilize-o para cobrir generosamente o interior da boca (lábios interiores, dentes, língua e palato).



Certifique-se de que a espuma está intacta, antes de eliminar a DenTips® e as zaragatoas com sucção. Inspeccione a cavidade oral e remova quaisquer partículas, se as houver.

Para saber mais sobre cuidados orais, contacte entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: www.medline.eu/pt