

VAPrevent[®] Mundpflege-Set mit Absaug-Zahnbürste

Gebrauchsanweisung: MDS096572MEU



1
Ziehen Sie Handschuhe an und überprüfen Sie die Mundhöhle des Patienten. Verwenden Sie ein Absaugsystem, wenn nötig. Ziehen Sie anschließend die Verpackungsfolie ab und überprüfen Sie vorsichtig, ob der Schaumstoff auf der Zahnbürste und dem Mundpflegestäbchen (DenTips[®]) intakt ist.



2
Verwenden Sie einen Beißkeil, wenn Sie Mundpflege bei Patienten mit veränderten Bewusstseinssebenen oder Patienten, die Anweisungen nicht verstehen können, durchführen. Öffnen Sie die Medline Mundspülung und gießen Sie diese in den integrierten Becher der Verpackung.



3
Schließen Sie die Absaug-Zahnbürste an das Absaugsystem an. Stellen Sie sicher, dass die Absaug-Zahnbürste fest aufgesteckt ist.



4
Befeuchten Sie die Zahnbürste gut mit Mundspülung. Putzen Sie ca. 1 bis 2 Minuten behutsam die Zähne und das Zahnfleisch. Ermöglichen Sie das Absaugen durch Schließen des Daumen-Ports.



5
Öffnen Sie das Medline-Mundbefeuchtungsgel und geben Sie es auf das Mundpflegestäbchen (DenTips[®]). Befeuchten Sie damit sorgsam die Innenseite des Mundes, einschließlich Zähne, Lippen, Zunge und Gaumen.



6
Überprüfen Sie nach der Anwendung, ob der Schaumstoff intakt ist, bevor Sie die Absaug-Zahnbürste und das Mundpflegestäbchen (DenTips[®]) entsorgen. Untersuchen Sie die Mundhöhle und entfernen Sie eventuell vorhandene Partikel.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de