

# VAPrevent®

Instrucciones de uso: MDS096572MEU



1 Utilizando guantes de examen, inspeccione la cavidad bucal del paciente para verificar la condición de ésta. A continuación, retire la película del envase y compruebe que la espuma de los cepillos de succión y de DenTips® está intacta.



3 Conecte el cepillo de succión a un tubo de aspiración estándar. Compruebe que está bien conectado.



4 Empape el cepillo de dientes con enjuague bucal. Limpie con suavidad los dientes y las encías durante aproximadamente 1 o 2 minutos. aspire presionando el puerto de control con el pulgar.



5 Abra el hidratante bucal y aplíquelo sobre DenTips. Cubra generosamente el interior de la boca (dientes, labios, lengua, paladar) con él.



6 Compruebe que la espuma está intacta antes de deshacerse del cepillo de succión y de DenTips. Inspeccione la cavidad bucal y retire cualquier residuo que haya presente.

Para obtener más información sobre **cuidado bucal**, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)