

VAPrevent®

Istruzioni per l'uso: MDS096572MEU



1
Indossare i guanti, controllare la bocca del paziente ed effettuare una prima aspirazione nella cavità orale, se necessario. Poi aprire la confezione tirando la pellicola posteriore e assicurarsi che la spugna dello spazzolino e del DenTips® siano integri.



2
Utilizzare un blocca morso durante le procedure di igiene orale su pazienti con livelli alterati di coscienza o che non possono comprendere i comandi. Aprire il collutorio di Medline e versarlo nella coppa presente nel confezionamento.



3
Connettere il tampone di aspirazione al sistema di aspirazione. Controllare che la connessione sia ben salda.



4
Immergere lo spazzolino nel collutorio. Spazzolare delicatamente denti e gengive per 1-2 minuti circa. Aspirare utilizzando il controllo del vuoto.



5
Aprire il gel idratante di Medline e spremerlo sul DenTips®. Distribuire delicatamente nella bocca (denti, labbra, lingua, palato).



6
Dopo l'uso, assicurarsi che la spugna sia intatta prima di smaltire il DenTips®. Ispezionare la cavità orale e rimuovere ogni residuo, se presente.

Per ulteriori informazioni sulla cura del cavo orale, contattare l'account manager o visitare il sito: www.medline.eu/it