

VAPrevent®

Istruzioni per l'uso: MDS096572MEU



1
Indossare i guanti, controllare la bocca del paziente ed effettuare una prima aspirazione nella cavità orale, se necessario. Poi aprire la confezione tirando la pellicola posteriore e assicurarsi che la spugna dello spazzolino e del DenTips® siano integre.



2
Utilizzare un blocco morso durante le procedure di igiene orale su pazienti con livelli alterati di coscienza o che non possono comprendere i comandi. Aprire il collutorio di Medline e versarlo nell'apposita presente nel confezionamento.



3
Connettere il tampone di aspirazione al sistema di aspirazione. Controllare che la connessione sia ben salda.



4
Immergere lo spazzolino nel collutorio. Spazzolare delicatamente denti e gengive per 1-2 minuti circa. Aspirare utilizzando il controllo del vuoto.



5
Aprire il gel idratante di Medline e spremere sul DenTips® Utilizzarlo per rivestire abbondantemente l'interno della bocca (labbra interne, denti, lingua e palato).



6
Dopo l'uso, assicurarsi che la spugna sia intatta prima di smaltire il DenTips®. Ispezionare la cavità orale e rimuovere ogni residuo, se presente.

Per saperne di più sull'igiene orale,
contattare l'account manager
Medline di zona o visitare il sito:
www.medline.eu/it