




INSTRUCCIONES DE USO: TOALLITAS ALOETOUCH®

Toallitas húmedas de higiene individuales

Limpieza después de cada episodio de incontinencia o uso para higiene personal diaria de todas las partes del cuerpo según sea necesario.

- 1 Abrir el paquete como se indica, extraer una toallita y limpiar la zona manchada.
- 2 Limpiar la región perianal de delante hacia atrás; usar toallitas adicionales si fuera necesario.
- 3 Tirar las toallitas al cubo de residuos; no tirar al inodoro.
- 4 Cerrar el envase después de usarlo para mantener la humedad de las toallitas.

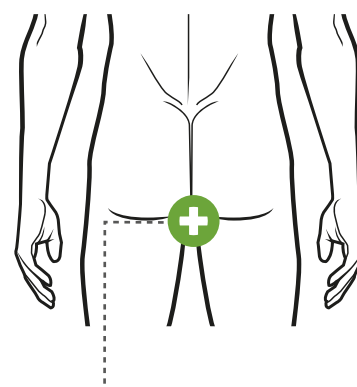

Limpiar siempre la región perianal de delante hacia atrás.



**NO TIRAR LAS
TOALLITAS
ALOETOUCH
AL INODORO.**



**TIRAR LAS
TOALLITAS
AL CUBO DE
RESIDUOS.**



Para obtener más información sobre Aloetouch, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite www.medline.eu/es