


# MODE D'EMPLOI: LINGETTES ALOETOUCH®

## Lingettes nettoyantes

Pour un nettoyage en douceur de la peau après chaque épisode d'incontinence ou en utilisation quotidienne pour tout le corps comme recommandé.

- 1 Ouvrir le paquet comme indiqué, prendre 1 lingette et nettoyer la zone concernée.
- 2 Nettoyer la région du périnée de l'avant vers l'arrière. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.
- 3 Jeter les lingettes à la poubelle et non dans les toilettes, car elles ne sont pas solubles.
- 4 Fermer le paquet après utilisation afin de maintenir les lingettes humides.

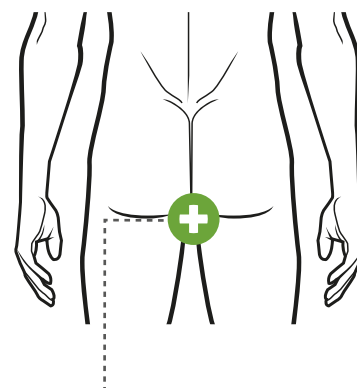

Toujours nettoyer la région du périnée de l'avant vers l'arrière



**NE PAS JETER  
LES LINGETTES  
ALOETOUCH  
DANS LES  
TOILETTES.**



**LES JETER  
DANS UNE  
POUBELLE.**



Pour plus d'informations concernant les lingettes Aloetouch, contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)