


GEBRUIKSAANWIJZING ALOETOUCH® DOEKJES

Doekjes voor persoonlijke hygiëne

Voor reiniging na incontinentie of voor dagelijks gebruik op elk deel van het lichaam waar nodig.

- 1 Open de verpakking zoals aangegeven, neem 1 doekje en reinig waar nodig.
- 2 Veeg in het perineale gebied van voor naar achter; gebruik zo nodig meerdere doekjes.
- 3 Gooi de doekjes na gebruik bij het afval; spoel ze niet door het toilet.
- 4 Sluit de verpakking na gebruik om de doekjes vochtig te houden.

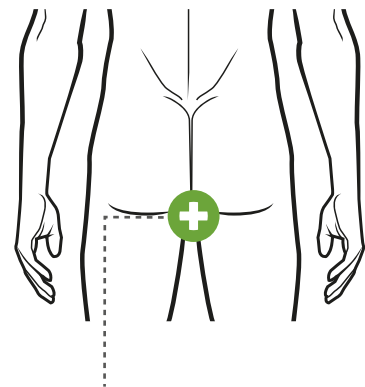

Veeg het perineale gebied altijd schoon van voor naar achter.



**ALOETOUCH
DOEKJES
NIET DOOR-
SPOELEN.**



**GOOI
ZE WEG
BIJ HET
AFVAL.**



Neem voor meer informatie over Aloetouch contact op met uw Medline vertegenwoordiger of ga naar: www.medline.eu/nl