


MODO DE UTILIZAÇÃO: TOALHETES ALOETOUCH®

Toalhetes de Higiene Pessoal

Para limpar após um episódio de incontinência ou para utilização diária, limpeza pessoal de todas as partes do corpo conforme for necessário.

- 1 Abrir a embalagem conforme indicado, retirar um toalhete e limpar a zona suja.
- 2 Limpar a região perineal da frente para trás; usar mais toalhetes se necessário.
- 3 Eliminar os toalhetes no balde do lixo; não deitar na sanita.
- 4 Fechar a embalagem após a utilização para manter a humidade dos toalhetes.

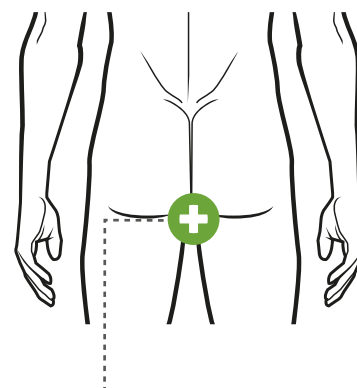

Limpar sempre a região perineal da frente para trás.



**NÃO DEITAR
NA SANITA
TOALHETES
ALOETOUCH.**



**ELIMINAR OS
TOALHETES
NO LIXO.**



Para mais informações sobre as toalhetes Aloetouch, contacte o gestor de conta Medline ou consulte: www.medline.eu/pt