

Anwendungshinweise: AloeTouch®



Reinigungstücher für den persönlichen Bedarf

Verwenden Sie die Reinigungstücher nach Inkontinenz oder für die tägliche Reinigung nach Bedarf.

- 1 Öffnen Sie die Packung wie angegeben, entnehmen Sie ein Tuch und reinigen Sie die betroffene Region.
- 2 Wischen Sie die Intimregion bitte stets von vorne nach hinten; verwenden Sie bei Bedarf mehr als ein Tuch.
- 3 Entsorgen Sie die Tücher im Hausmüll; spülen Sie sie nicht in der Toilette herunter.
- 4 Verschließen Sie die Packung nach Gebrauch, um die Feuchtigkeit zu bewahren.



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.