


Modalità di utilizzo: Salviette AloeTouch®



Salviette per igiene personale

Pulizia dopo ogni episodio di incontinenza o per uso quotidiano ed igiene personale. Adatto per tutte le zone del corpo.

- 1 Aprire la confezione come indicato, prendere una salvietta e pulire la zona sporca.
- 2 Pulire la regione perineale agendo dalla zona anteriore verso quella posteriore. Utilizzare più salviette se necessario.
- 3 Smaltire le salviette nell'apposito cestino; non buttare nella toilette.
- 4 Chiudere la confezione dopo l'uso per mantenere le salviette umide.

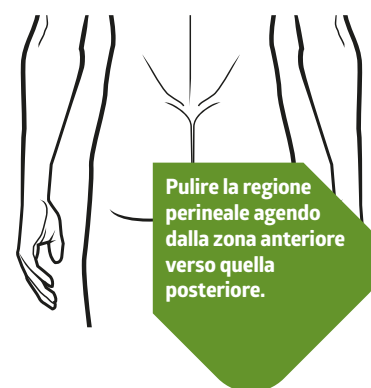

Per ulteriori informazioni su AloeTouch contattare l'account manager Medline o visitare il sito: www.medline.eu/it