

# Humidificadores Hudson RCI®

La guía de instalación de AquaPak®



## Cinco pasos para conseguir una buena humidificación

1



Saque el humidificador AquaPak y el adaptador de humidificación de su envase.

2



Enrosque el adaptador de humidificación en la botella AquaPak.

3



Rompa la pequeña boquilla de plástico de la botella levantándola hacia arriba.

**ATENCIÓN:** No tuerza la boquilla. Si se tuerce la boquilla, se reduce el diámetro interior de la abertura del humidificador AquaPak y se reduce la liberación de presión, lo que provoca una sobrepresurización de la botella.

4



Enrosque la botella y el adaptador de humidificación AquaPack al caudalímetro.

5



Conecte el tubo de O<sub>2</sub>, incluida la interfaz (mascarilla/cánula nasal), al puerto.