

# 5 étapes pour une humidification réussie

1



Sortir l'AquaPak et l'adaptateur d'humidification de son emballage.

2



Visser l'adaptateur d'humidification sur la bouteille d'AquaPak

3



Casser la petite «tétine» en plastique en la remontant vers le haut.

**ATTENTION** : Ne pas tordre ni tourner la tétine. La torsion de la tétine rétrécit le diamètre intérieur de l'ouverture de l'AquaPak et réduit la libération de la pression, ce qui entraîne une surpression de la bouteille.

4



Visser l'ensemble AquaPak/adaptateur d'humidification sur le débitmètre

5



Fixez la tubulure d'O<sub>2</sub>, y compris l'interface (masque, lunettes à O<sub>2</sub>) au port.