

# Hudson RCI® Luchtbevochtigers

De AquaPak® installatiegids



## Vijf stappen voor succesvol bevochtigen

1



Haal de AquaPak en de luchtbevochtigingsadapter uit de verpakking.

2



Draai de luchtbevochtigingsadapter op de AquaPak fles.

3



Breek het kleine plastic lipje op de fles af door deze omhoog te tillen.

**LET OP:** Draai het plastic lipje niet. Door het lipje te draaien krimpt de binnendiameter van de AquaPak-opening en vermindert de drukontlasting, wat resulteert in overdruk in de fles.

4



Draai de luchtbevochtigingsadapter en AquaPak fles op de flowmeter.

5



Verbindt de zuurstofslang, inclusief de interface (masker/neusbriil), met de poort.