


Humidificadores Hudson RCI®

Guia de instalação Aquapak®



Cinco passos para uma humidificação bem-sucedida

1

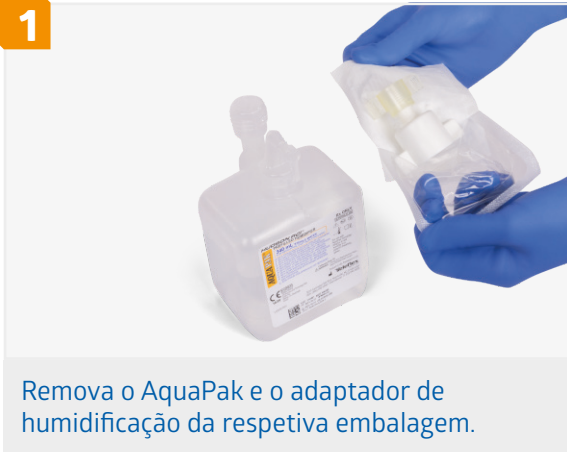

Remova o AquaPak e o adaptador de humidificação da respectiva embalagem.

2



Aparafuse o adaptador de humidificação na garrafa AquaPak.


3



Parta a pequena peça de plástico da garrafa levantando-a para cima.


AVISO: Não torcer a peça. Se torcer a peça, o diâmetro interno da abertura do AquaPak irá reduzir-se, diminuindo a pressão de libertação, o que provoca uma sobrepresurização da garrafa.

4

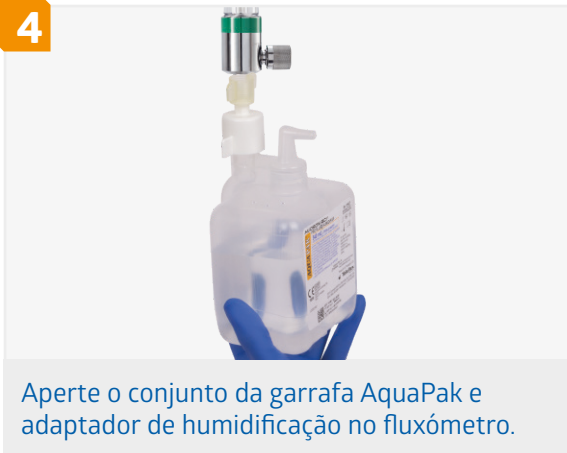

Aperte o conjunto da garrafa AquaPak e adaptador de humidificação no fluxómetro.

5

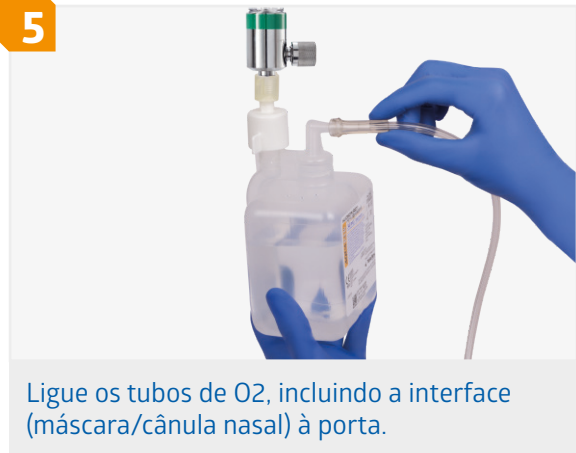

Ligue os tubos de O2, incluindo a interface (máscara/cânula nasal) à porta.