

# Installation et utilisation de l'Aquatherm III

## Installation du réchauffeur




Cette procédure nécessite :

- Une source d'oxygène ou d'air comprimé
- Un adaptateur de nébulisation propre et neuf
- Une bouteille d'eau stérile pour nébulisation Aquapak

**Attention !** Pour un fonctionnement optimal, veuillez toujours à ce que le réchauffeur soit placé en position verticale.

1. Vérifiez que toutes les surfaces du réchauffeur soient propres et intactes.
2. Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension.
3. Tournez la molette de réglage de la température sur le chiffre 1.
4. Vissez un adaptateur de nébulisation propre et neuf (403128, 031-28F\*, 403133) au raccord fileté situé sur le dessus du réchauffeur.
5. Branchez la bouteille d'eau stérile Aquapak en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre au raccord fileté approprié situé sous le réchauffeur Aquatherm III. Vissez la bouteille jusqu'à sentir une résistance. Ne pas forcer.
6. Retirez le capuchon en plastique de l'extrémité du tube de retour du nébuliseur pour exposer la broche du connecteur.
7. Insérez la broche dans la surface ronde surélevée, de 0,6 cm de diamètre, au-dessus de l'étiquette. En effectuant un léger mouvement de rotation, percez la bouteille en plastique et introduisez entièrement la broche. Un bref sifflement peut être entendu lorsque la broche perce la bouteille.
8. Vissez la vis papillon filetée située sur le dessus de l'adaptateur du nébuliseur au débitmètre de la source d'oxygène. Tournez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer. Veillez à ce que l'écrou soit serré sans excès.
9. Une fois l'assemblage terminé, la bouteille-réservoir doit être suspendue au réchauffeur et ne doit pas reposer sur une surface.

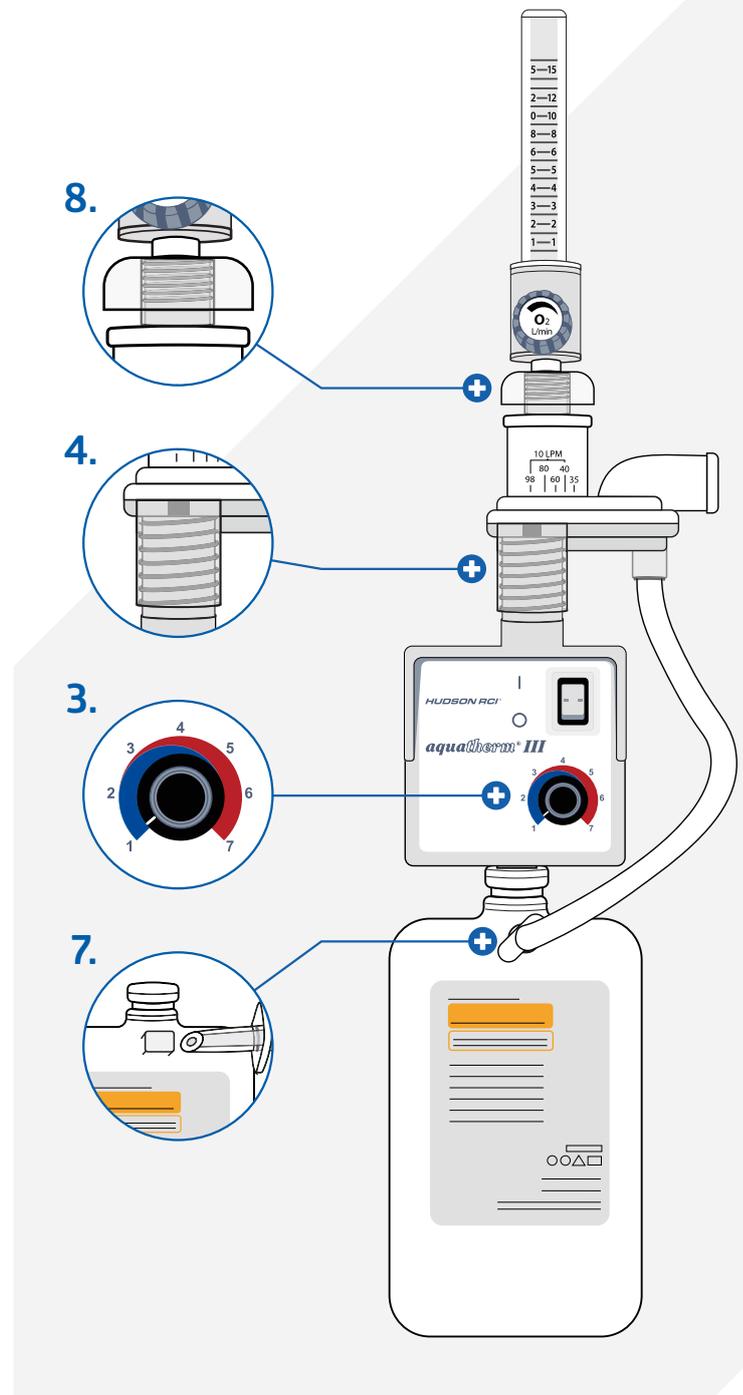

\*031-28F est un adaptateur de nébulisation conçu pour être compatible avec le marché français.

**Avvertimento !** Cette affiche condensée est destinée à la formation des professionnels de santé. Consultez le mode d'emploi pour obtenir des précisions, la liste complète des avertissements et les consignes de dépannage.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs qui pourraient se produire.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1499\_FR 11/2024


# Installation et utilisation d'Aquatherm III

## Démarrage du réchauffeur



**Avertissements !** Le réchauffeur ne doit pas fonctionner si aucun flux d'air ou d'oxygène ne parvient à l'adaptateur du nébuliseur.

1. Branchez le nébuliseur sur une source d'oxygène ou d'air qui n'est pas en circulation.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise mise à la terre.
3. Si vous utilisez de l'oxygène, réglez le collier d'entraînement du nébuliseur et sélectionnez la concentration d'oxygène souhaitée. Si vous utilisez une source d'air, réglez le collier d'entraînement du nébuliseur pour obtenir le débit total souhaité.
4. Mettez en marche le flux d'oxygène ou d'air et réglez-le au débit souhaité. Si vous utilisez le système avec des compresseurs, réglez la pression de sortie à un niveau permettant d'obtenir le débit total souhaité.
5. Raccordez la tubulure de l'aérosol à la sortie du nébuliseur. Les spécifications de la tubulure ne doivent pas être inférieures à 152 cm (longueur) et 22 mm (diamètre) (tubulure d'administration d'aérosols standard).
6. Raccordez l'extrémité ouverte de la tubulure de l'aérosol à un thermomètre ou à un autre dispositif permettant de contrôler la température de l'aérosol. La température est mesurée à la sortie du tuyau de 1,5 m, dans la direction la plus proche du patient.
7. Branchez-le à l'interface patient.
8. Allumez l'interrupteur du réchauffeur. Tournez le bouton de réglage de la température vers la droite, jusqu'au réglage souhaité.
9. Initialement, la température est réglée sur 5. Laissez la température se stabiliser. Après stabilisation de la température, ajustez vers le haut/bas jusqu'à ce que la température de l'aérosol désirée soit atteinte.
10. Attendez 25 minutes que la température de sortie se stabilise.
11. Réglez la température par petites étapes, en vous arrêtant pendant 20 minutes après chaque réglage afin de permettre à la température de changer et de se stabiliser.

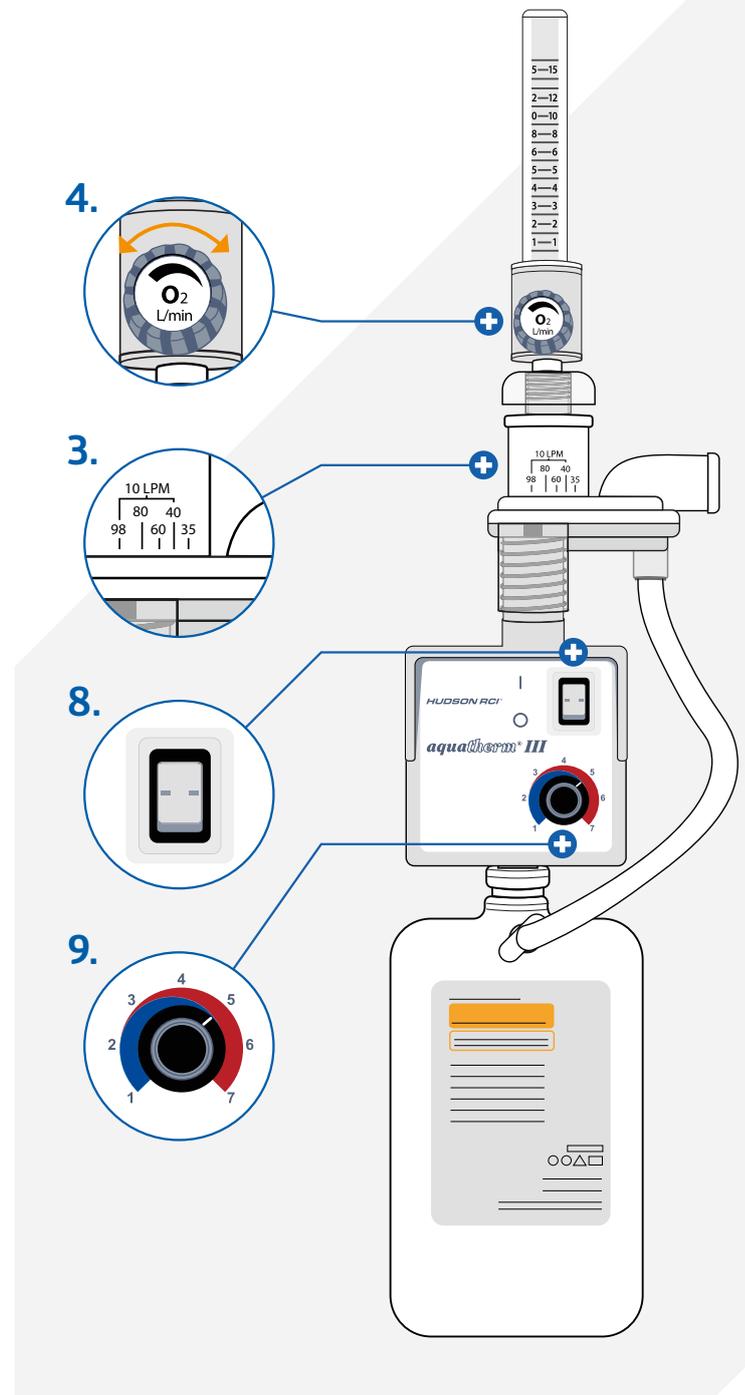

**Avertissement !** Cette affiche condensée est destinée à la formation des professionnels de santé. Consultez le mode d'emploi pour obtenir des précisions, la liste complète des avertissements et les consignes de dépannage.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs qui pourraient se produire.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1499\_FR 11/2024

# Installation et utilisation d'Aquatherm III

## Remplacement du réservoir




Cette procédure permet de remplir le système de nébulisation avec de l'eau après avoir vidé une bouteille-réservoir.

### Avertissements !

- Laissez le réchauffeur refroidir avant de le manipuler.
- Le réchauffeur ne doit pas fonctionner si la bouteille-réservoir est vide.
- Pendant le remplacement du réservoir, ne laissez pas l'appareil sous tension.
- Ne serrez pas trop la bouteille-réservoir.
- Ne faites pas fonctionner le réchauffeur sans oxygène ni flux d'air vers l'adaptateur de nébuliseur.

1. Éteignez le réchauffeur et coupez l'alimentation en oxygène ou en air. Il n'est pas nécessaire de régler la température à l'aide du bouton de température.
2. Retirez du réservoir la broche de perforation du retour de condensat.
3. Détachez délicatement le réservoir vide du réchauffeur en le faisant tourner vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il sorte de son logement.
4. Fixez le nouveau réservoir Aquapak au fond du réchauffeur Aquatherm III. Insérez la bride située sur le dessus du flacon dans le raccord situé sous le réchauffeur. Tournez le flacon vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé au fond du réchauffeur et qu'il s'arrête. Évitez de trop serrer.
5. Raccordez le tuyau de retour de condensat du nébuliseur à l'orifice de retour du réservoir.
6. Allumez le réchauffeur.
7. Mettez en marche l'alimentation en oxygène ou en air et réglez le débit d'oxygène sur les paramètres souhaités.

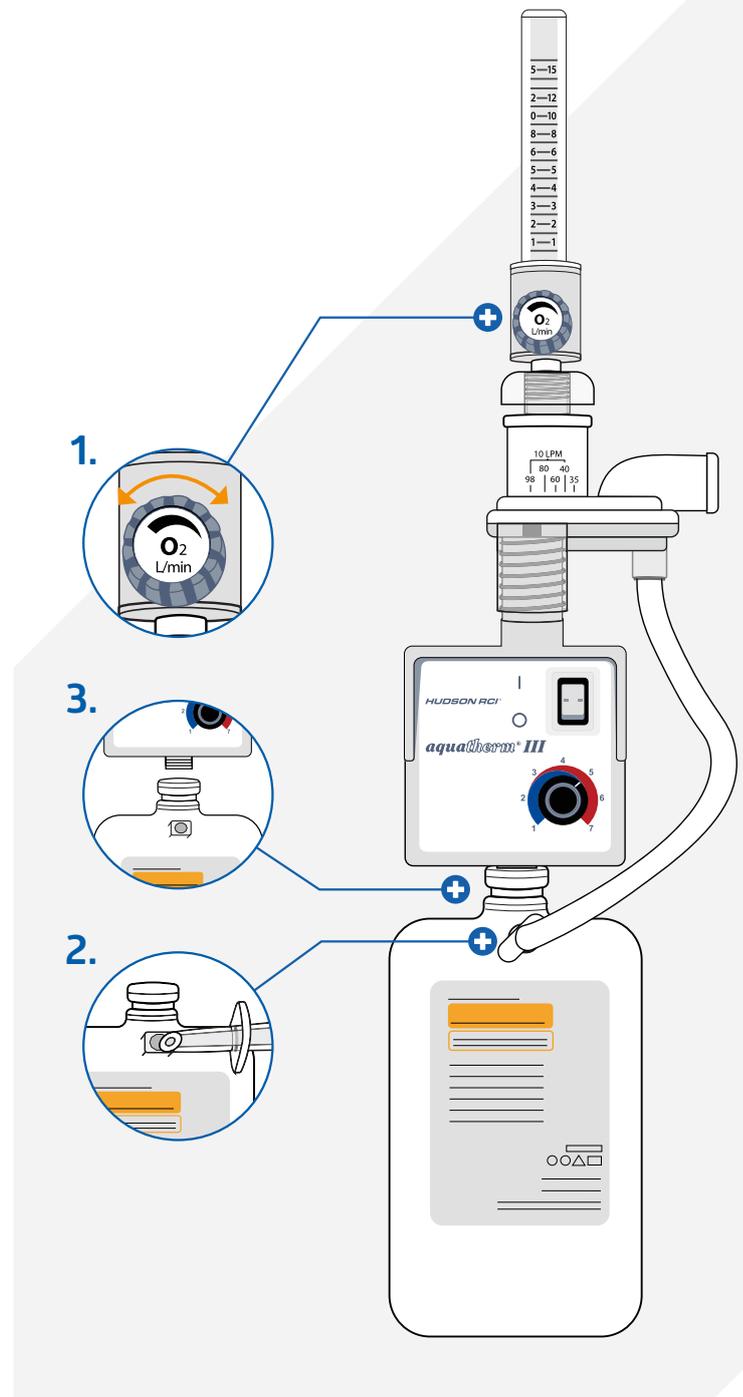

**Avvertimento !** Questa scheda condensata è destinata alla formazione dei professionisti della sanità. Consultare il manuale di istruzioni per ottenere informazioni precise, l'elenco completo delle avvertenze e le istruzioni di manutenzione.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs qui pourraient se produire.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1499\_FR 11/2024