



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

CVP POUR LA GESTION DU CHOC SEPTIQUE CUHG1-INT

Retirez Compass UniversalHg de son emballage stérile.

Activez et calibrez Compass UniversalHg en appuyant sur le bouton pendant environ une seconde, jusqu'à ce que l'affichage indique «00 mm» (Figure 1).

Attention : Activez et calibrez Compass UniversalHg avant de le fixer aux accessoires pour éviter une pression de base incorrecte.

Retirez le capuchon. Le retrait de ce capuchon avant l'étalonnage n'affecte pas la lecture. Rincer le Compass UniversalHg avec une solution saline et fixez le Compass UniversalHg à l'embout distal du cathéter veineux central (Figure 2).

Positionnez le Compass UniversalHg à la voie médio-maxillaire ou à l'axe phlébostatique, en fonction de l'inclinaison du patient, puis relevez la pression veineuse centrale. La pression est affichée sur l'écran LCD du Compass UniversalHg (Figure 3).

Si un tube d'extension (vendu séparément) est requis pour atteindre l'axe phlébostatique, fixez le Compass UniversalHg au tube d'extension, puis rincez-le avant de le fixer à l'embout distal du cathéter veineux central.

Pour une lecture de pression continue ou intermittente, l'orifice femelle de verrouillage du Compass UniversalHg peut être coiffé par un raccord de valve stérile sans aiguille ou un capuchon stérile.

Remarque : Si Compass UniversalHg est bouché, rincez-le pour assurer la perméabilité avant la mesure de pression.







Pour une lecture intermittente de pression avec perfusion de fluide, l'orifice femelle Luer de verrouillage du Compass UniversalHg peut être branché à une tubulure de perfusion. (Figure 4). Lorsqu'une lecture de pression est nécessaire, fermez le clamp à roulette avant de procéder au relevé (Figure 5).

Remarque : Lorsque le clamp à roulette est ouvert pendant la perfusion de liquide, le Compass UniversalHg signalera la pression du liquide de perfusion, PAS la pression veineuse centrale (Figure 6).

Mise hors tension et recalibrage du dispositif

Appuyez trois fois sur le bouton selon la séquence 'POUSSER - POUSSER - MAINTENIR ENFONCÉ' (c'est-à-dire, appuyez rapidement deux fois sur le bouton puis maintenez enfoncé le troisième bouton jusqu'à ce que le dispositif s'éteigne). Pour recalibrer et mettre à zéro le dispositif, appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que l'écran affiche «00 mm».

Pour les instructions complètes et leurs avertissements, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif.

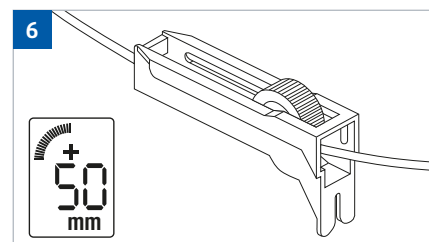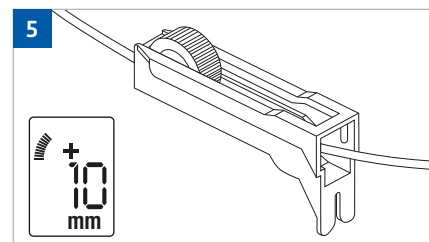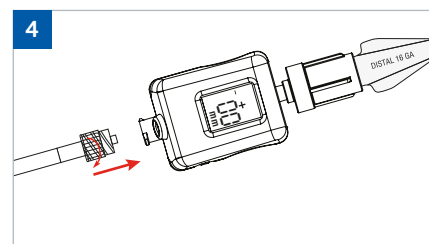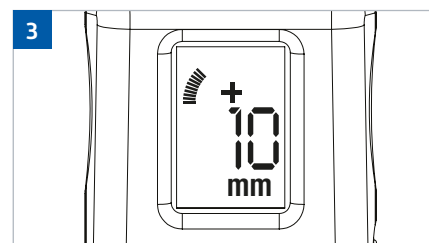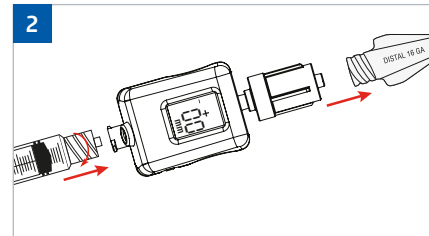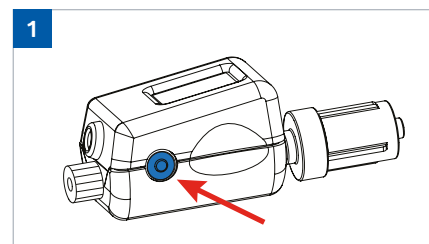

**ALWAYS
ON.**

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève
Suisse
Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com