

## CVD BIJ SEPSIS

### CUHG1-INT

Haal de Compass UniversalHg uit de steriele verpakking.

Activeer en kalibreer de Compass UniversalHg door ongeveer één seconde op de blauwe knop te drukken tot er '00 mm' in het display staat (Afbeelding 1).

**Waarschuwing: Activeer en kalibreer de Compass UniversalHg voordat deze aan de accessoires gekoppeld wordt om een incorrecte basisdruk te voorkomen.**

Verwijder de proximale luer dop. Deze dop verwijderen voor de kalibratie is niet van invloed op de meting. Bereid de Compass UniversalHg voor met zoutoplossing en koppel de Compass UniversalHg aan de distale aansluiting van de centraal veneuze katheter (Afbeelding 2).

Plaats de Compass UniversalHg op de midaxillaire lijn of de flebostatische as, afhankelijk van de positie van de patiënt, en meet vervolgens de centraal veneuze druk. Druk wordt weergegeven op het LCD van de Compass UniversalHg (Afbeelding 3).

Koppel, als een verlengslang (apart verkrijgbaar) nodig is om de flebostatische as te bereiken, de Compass UniversalHg aan de verlengslang en bereid hem daarna voor alvorens hem aan de distale aansluiting van de centraal veneuze katheter te koppelen.

Om continu of met tussenpozen de druk af te lezen, kan de female luer lock poort van de Compass UniversalHg afgesloten worden met een steriele naaldvrije afsluitkraan of steriele dop.

Notitie: Als de Compass UniversalHg is afgesloten, eerst doorspoelen om goede doorstroming te garanderen alvorens de CVD te meten.

Voor CVD metingen met tussenposen met toedienen van vloeistof kan de female luer lock poort van de Compass UniversalHg aangesloten worden op een slang om vloeistof toe te dienen (Afbeelding 4). Sluit de slang af (met rolklem of andere klem) voordat druk gemeten wordt (Afbeelding 5).

Notitie: Als de rolklem open staat tijdens het toedienen van de vloeistof meet de Compass UniversalHg de druk van de vloeistof die wordt toegediend en NIET de centraal veneuze druk (Afbeelding 6).

### Apparaat Uitschakelen en Herkalibratie

Druk drie keer op de knop in de volgorde 'INDRUKKEN - INDRUKKEN - VASTHOUDEN' (dat wil zeggen drie keer achter elkaar op de knop drukken en bij de derde keer de knop vasthouden tot het apparaat uit gaat). Voor herkalibratie van het apparaat op 0, stel het apparaat bloot aan de atmosfeer en druk op de knop tot er '00 mm' in het display staat.

Lees de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat geleverd wordt voor volledige instructies en waarschuwingen.

