



Messung des zentralen Venendrucks beim Sepsis Management

CUHG1-INT

Nehmen Sie den Compass UniversalHg aus der sterilen Verpackung.

Aktivieren und kalibrieren Sie den Compass UniversalHg, indem Sie die Einschalttaste für etwa eine Sekunde gedrückt halten, bis auf dem Display „00 mm“ angezeigt wird (Abb. 1).

Achtung: Aktivieren und kalibrieren Sie den Compass UniversalHg, bevor Sie das Gerät an ein Zubehör anschließen, um fehlerhafte Basisdruckwerte zu vermeiden.

Entfernen Sie den proximalen Luer-Verschluss. Ein Entfernen des Verschlusses vor der Kalibrierung hat keinen Einfluss auf den Messwert. Entlüften Sie den Compass UniversalHg mit Kochsalzlösung und schließen Sie das Gerät an den distalen Anschluss des zentralen Venenkatheters an (Abb. 2).

Platzieren Sie den Compass UniversalHg auf der mittleren Axillarlinie oder der phlebostatischen Achse je nach Lage des Patienten und beginnen Sie dann mit der Messung des zentralen Venendrucks. Der Druck wird am Display des Compass UniversalHg angezeigt (Abb. 3).

Wenn eine Schlauchverlängerung benötigt wird, um die phlebostatische Achse zu erreichen, schließen Sie den Compass UniversalHg an die Verlängerung an und entlüften Sie die Verlängerung und das Gerät, bevor Sie Compass an den distalen Verschluss des zentralen Venenkatheters anschließen.

Für eine kontinuierliche oder intermittierende Druckmessung kann der weibliche Luer-Lock-Port des Compass UniversalHg mit einer sterilen nadellosen Verschlusskappe verschlossen werden.

Hinweis: Wenn an den Compass UniversalHg eine Verschlusskappe angebracht wurde, spülen Sie ihn vor der weiteren Anwendung durch, um die Durchlässigkeit vor der ZVD-Messung zu überprüfen.







Für eine intermittierende ZVD-Messung mit Flüssigkeit (Infusion) kann der weibliche Luer-Lock-Port des Compass UniversalHg an einen Infusionsschlauch angeschlossen werden (Abb. 4). Schließen Sie die Rollenklemme (Schieber oder andere Klemme), bevor Sie die Messung durchführen (Abb. 5).

Hinweis: Wenn die Rollenklemme während der Infusion offen ist, zeigt der Compass UniversalHg den Druck der Infusion an, jedoch NICHT den Venendruck (Abb. 6).

Gerät ausschalten und rekali-brieren

Drücken Sie die Taste drei Mal in einer „KURZ – KURZ – LANG“ Sequenz (d.h. drücken Sie die Taste zwei Mal kurz und halten Sie anschließend die Taste beim dritten Mal so lange gedrückt, bis das Gerät sich ausschaltet). Um das Gerät zu rekali-brieren und zurück zu setzen, sollten alle angeschlossenen Gegenstände vom Gerät entfernt werden. Anschließend drücken Sie bitte die Einschalttaste, bis das Display „00 mm“ anzeigt.

Bitte lesen Sie für vollständige Anweisungen und Warnhinweise, die dem Gerät beigefügte Gebrauchsanweisung.

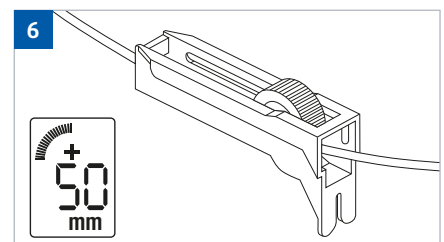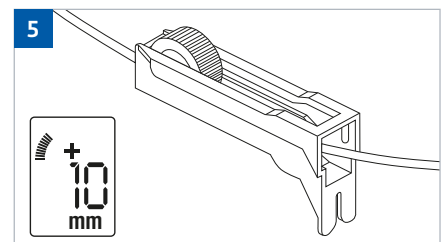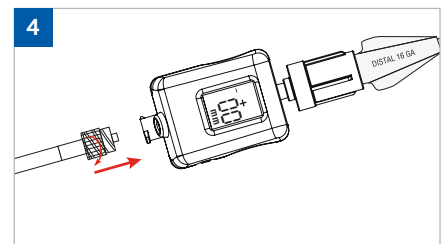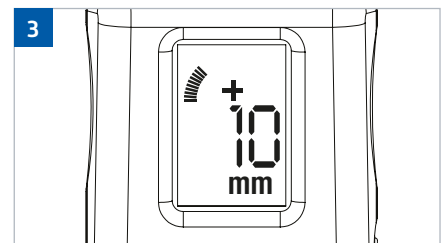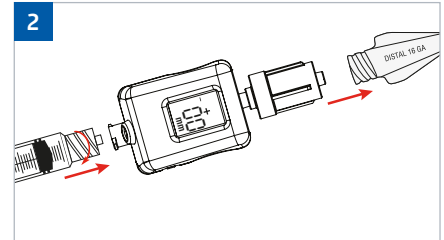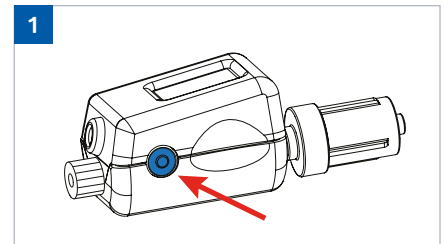

ALWAYS
ON.

Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

de.medline.eu
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

de.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

de.medline.eu
at-customerservice@medline.com

