



**CENTURION**  
MEDICAL PRODUCTS

## PVC PARA GESTÃO DE SÉPSIS CUHG1-INT

Remover o Compass UniversalHg da embalagem estéril.

Ativar e calibrar o Compass UniversalHg pressionando o botão de energia azul durante aproximadamente um segundo até que no visor seja apresentado «00 mm» (Figura 1).

Aviso: Ativar e calibrar o Compass UniversalHg antes de o ligar aos acessórios para evitar uma pressão inicial de referência incorreta.

Remover a tampa Luer proximal. A remoção desta tampa antes da calibração não afeta a leitura. Irrigar o Compass UniversalHg com soro fisiológico e conectar o Compass UniversalHg à porta distal do cateter venoso central (Figura 2).

Posicionar o Compass UniversalHg na linha axilar média ou eixo flebostático, dependendo da inclinação do doente e, em seguida, medir a pressão venosa central. A pressão é exibida no LCD do Compass UniversalHg (Figura 3).

Se for necessário um tubo de extensão (vendido à parte) para alcançar o eixo flebostático, conectar o Compass UniversalHg ao tubo de extensão e, em seguida, irrigá-lo antes de o conectar à porta distal do cateter venoso central.

Para uma leitura de pressão contínua ou intermitente, a porta Luer Lock fêmea do Compass UniversalHg pode ser tapada com um conector de válvula sem agulha estéril ou tampa estéril.

Nota: Se o Compass UniversalHg for tapado, irrigar para garantir a permeabilidade antes da medição da PVC.







Para uma leitura intermitente da PVC com infusão de fluidos, a porta Luer Lock fêmea do Compass UniversalHg pode ser ligada ao tubo de infusão de fluidos (Figura 4). Quando for necessário ler a pressão, fechar o clampe (corrediço ou outro estilo de clampe) antes de fazer a leitura (Figura 5).

Nota: Se o clampe estiver aberto durante a infusão de fluidos, o Compass UniversalHg irá dar a pressão do fluido de infusão e NÃO a pressão venosa central.

### Desligar e recalibrar o dispositivo

Pressionar o botão três vezes numa sequência «PRESSIONAR - PRESSIONAR - MANTER PRESSIONADO» (ou seja, pressionar o botão rapidamente duas vezes seguidas e depois à terceira manter o botão pressionado até o dispositivo se desligar). Para recalibrar e repor o dispositivo a zero, abrir o dispositivo para a atmosfera e pressionar o botão de energia até aparecer «00 mm» no visor.

Para obter instruções completas e avisos, consulte as instruções de utilização que acompanham o dispositivo.

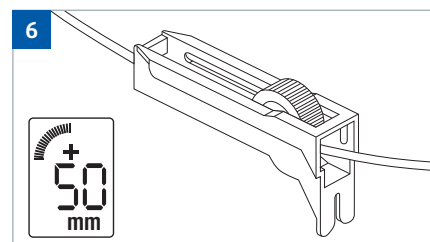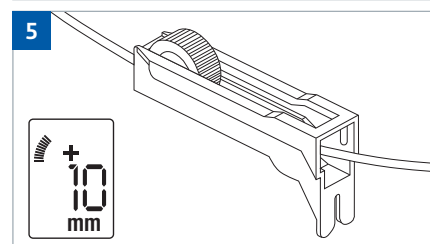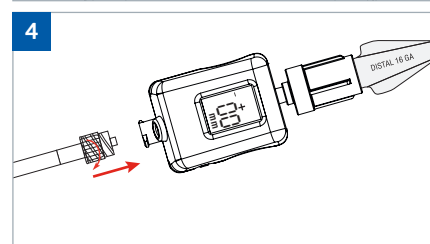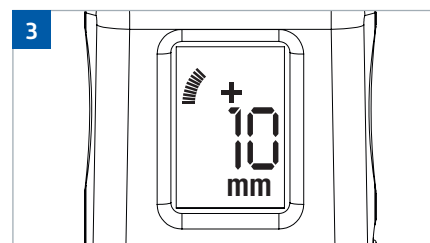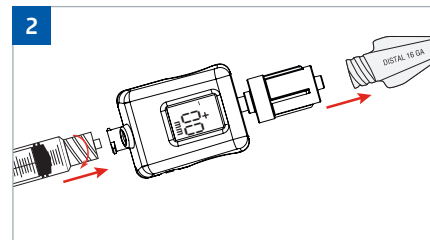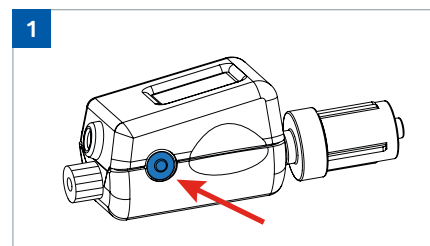

**ALWAYS  
ON.**

Medline International Portugal, Unipessoal, Lda  
Campo Grande, 137, 1º dtº  
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande  
1700 089 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921  
Fax: +351 808 291 922  
[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atenciaocliente@medline.com](mailto:pt-atenciaocliente@medline.com)

O Compass UniversalHg é um dispositivo médico classe IIa destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML857\_PT 08/2021

Centurion Medical Products Corporation  
1633 Centurion Way  
Williamston, MI 48896, USA

CE 2797 (BSI, The Netherlands)