



# CONSIGNES D'UTILISATION TONDEUSES ET LAMES

## IMPORTANT

Tenez le corps de la tondeuse de façon à ce que le corps de la lame soit à plat contre la peau du patient.

Maintenez une prise constante sur le corps de la tondeuse sans exercer de pression excessive.

Réalisez des mouvements courts et légers.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez la tondeuse à rebrousse-poil.

Toute autre manière de tenir la tondeuse risque d'occasionner des coupures ou irritations.

Toujours lire la notice d'utilisation avant d'utiliser le produit.

