



DIRECTRICES DE USO RECORTADORA MEDLINE

IMPORTANTE

- Sujete la recortadora de modo que la superficie de la hoja se encuentre plana sobre la piel del paciente.
- Mantenga agarrada firmemente la recortadora sin ejercer una presión excesiva.
- Realice movimientos cortos y suaves.
- Para obtener mejores resultados, mueva la recortadora en sentido contrario al crecimiento del vello. De lo contrario, la recortadora puede causar tirones o irritaciones.
- Lea el manual de instrucciones antes de utilizar la recortadora.

