



Recortadora Quirúrgica

Un nuevo referente en Seguridad, Comodidad y Eficacia en la eliminación preoperatoria del vello

Ventajas y Beneficios:

- Tres tipos diferentes de cabezales intercambiables
- Protege la integridad de la piel eliminando los riesgos de lesiones
- Empuñadura ergonómica y con laterales antideslizantes para obtener un máximo control en el recorte de vello y mayor facilidad de uso
- Los cabezales se adaptan y se eliminan de forma sencilla
- Batería híbrida de níquel que garantiza la máxima duración



Referencia	Descripción	Color	Cantidad
DYND70800EU	Recortadora y Base de carga	Blanco	1
DYND70801EU	Recortadora individual	Blanco	1
DYND70802EU	Base de carga individual	Blanco	1
DYND70880E	Cabezal universal	Gris	50/caja
DYND70885E	Cabezal especial para neurocirugía	Azul	50/caja
DYND70890E	Cabezal especial para áreas sensibles	Rojo	50/caja




Todo lo que necesita para el recorte pre-quirúrgico de vello



1 Adaptación de los cabezales

- Para colocar el cabezal sobre la recortadora, simplemente hay que alinear la línea lateral del cabezal con la superior de la recortadora
- Deslizando el cabezal hacia atrás, queda perfectamente encajado y alineado con las marcas a los lados de la máquina
- Escuche un "clic"

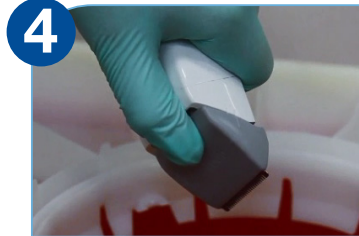

4 Eliminación de los cabezales

- Con la máquina apagada
- Para retirar el cabezal, debe simplemente colocar su pulgar sobre la hendidura del cabezal, y empujar hasta que el cabezal se desprenda



2 Uso

- Para un uso apropiado, deberá sujetar la recortadora como si fuera un bolígrafo
- Empuñadura ergonómica con sistema antideslizante en los laterales que permite un máximo control y facilidad de uso con una sola mano para los profesionales sanitarios



5 Limpieza y desinfección

- La recortadora de Medline se puede limpiar fácilmente enjuagándola en agua tibia y desinfectándola con un agente antimicrobiano no corrosivo



3 Recorte del vello en húmedo o en seco

- Con la máquina encendida
- Realice movimientos suaves y uniformes para eliminar el vello
- Para obtener un mejor resultado, hay que emplear la recortadora en el sentido contrario al crecimiento del vello



6 Almacenamiento

- Con la máquina apagada
- Coloque su máquina siempre en su base de carga

* Estos productos son productos sanitarios de clase I, fabricados por Medline Industries Inc., para cualquier información, por favor consulte las instrucciones de uso y el envasado.

CE 0086 EC REP Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France



Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid España

Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.com/es