



Kirurgisk Håravkortare

Designad för säkerhet, komfort och användarvänlighet

Fördelar

- 3 utbytbara bladordningar.
- Bevarar hudens integritet.
- Sidohandtag med antihalkfunktion för en bättre kontroll och möjlighet till enhandsgrepp.
- Nickel Metallhydrid batterier för längre kontinuerlig prestanda.



Artikelnummer	Beskrivning	Färg	Antal
DYND70800EU	Håravkortare och laddare	Vit	1
DYND70801EU	Håravkortare	Vit	1
DYND70802EU	Laddare	Vit	1
DYND70880E	Blad Universell	Grå	50/ks
DYND70885E	Blad Neuro	Blå	50/ks
DYND70890E	Blad Intim	Röd	50/ks




EN håravkortare för alla era behov !



1 Påsättning av blad

- Anpassa märket på bladet med den på klipparen
- Låt bladet glida fram tills det passar med märket på klipparen
- Ett "klick" hörs.

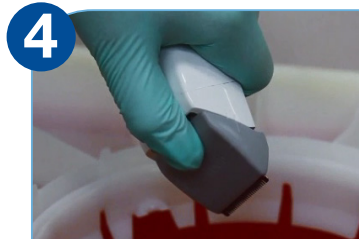

4 Borttag av blad

- Sätt den på "OFF" läge
- Sätt tummen mot bladets fördjupning
- Tryck tills bladet faller av



2 Grepp

- För korrekt användning, håll klipparen som en penna
- Antiglid handtag ger full kontroll över klipparen och möjliggör enhandsgrepp



5 Rengöring och desinficering

- Rengör under rinnande vatten
- Torka av med desinficeringsduk, ej korroderande medel



3 Klipper i vått och torrt

- Sätt på den på "ON" position
- Använd korta drag för att ta bort hår
- Bästa resultat uppnås om klippning utförs i riktning mot hårstråets växtriktning



6 Lagring

- Sätt klipparen i "OFF" position
- Placera i laddningsstationen

* Dessa produkter är medicintekniska produkter i klass I, som tillverkas av Medline Industries Inc. av någon information, se IFU och förpackning.

CE 0086

EC REP

Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France



Medline International Sweden AB
No 5 Booths Park
Chelford Road
Knutsford
Cheshire
WA16 8GS - United Kingdom

tel. 0844 334 5237
fax. 0844 334 5238
www.medline.com/en