



MODALITA' D'USO:



1

Aggancio delle lame

- Allineare la lama sulla parte superiore del clipper
- Spingere la lama finché non si allinea con il manipolo
- La lama si aggancia con un "click"



2

Utilizzo

- Per un uso corretto tenere il clipper come se fosse una penna
- I grip antiscivolo consentono una facile maneggevolezza anche con una sola mano



3

Effettuare l'epilazione su cute asciutta o bagnata

- Posizionare il clipper sulla posizione accesa (ON)
- Effettuare movimenti delicati per rimuovere la peluria
- Per un risultato migliore effettuare l'epilazione nel senso opposto al pelo



4

Rimozione delle lame

- Posizionare il clipper su spento (OFF)
- Mettere il pollice sulla piccola rientranza sul retro della lama
- Spingere verso il basso fin quando la lama non si stacca



5

Pulizia e disinfezione

- Sciacquare sotto acqua corrente
- Pulire con salviette imbevute di disinfettanti non corrosivi



6

Ricarica

- Posizionare il clipper su spento (OFF)
- Posizionare il clipper nell'apposito caricabatterie